

  wissner-
  bosserhoff

Funktional. Intelligent. Menschlich.

movita

Pflegebetten





movita Pflegebetten

Wirtschaftlich in der Pflege, komfortabel für den Bewohner

Der Pflegemarkt unterliegt umfangreichen Einflussfaktoren und Trends, wie dem steigenden Anteil Schwerstpflegebedürftiger und Demenzerkrankter. Dies stellt Betreiber und Pflegekräfte in Altenheimen vor wachsende qualitative und wirtschaftliche Herausforderungen. Umso mehr gilt dies vor dem Hintergrund eines knapper werdenden Angebotes an qualifizierten Pflegekräften. Gefragt sind Konzepte und Produkte, die die Pflege erleichtern und ökonomisch überzeugen. Die movita Pflegebetten kombinieren funktionelle Elemente mit Wirtschaftlichkeit und Wohnlichkeit.

2 Modelle zur Wahl – mobil oder wohnlich

movita lässt sich in jeder Betthöhe einfach und mühelos manövrieren – ganz besonders in der mobilen Modellvariante mit größeren Fahrrollen für noch mehr Fahrkomfort. So können auch stark beeinträchtigte und immobile Bewohner im Pflegebett am Leben in ihrem Wohnbereich oder ihrer Pflegeeinrichtung teilnehmen.



mobil | movita

Art.-Nr. 10-0540

L: 208 cm, B: 103/108 cm, H: 36-38 / 78-80 cm

100 mm Leichtlaufrollen oder 125 mm Designrollen

Bremse: Zentrale Rollenfeststellung mit einer Richtungsrolle, beidseitig per Tritthebel

Höhenverstellung: ca. 36/38 - 78/80 cm



wohnlich | movita casa

Art.-Nr. 10-0574

L: 208 cm, B: 103/106 cm, H: 38 / 80 cm

50 mm Doppellaufrollen

Bremse: Achsweisse Rollenfeststellung, beidseitig per Tritthebel

Höhenverstellung: ca. 37 - 80 cm



Wohnkonzept Ocean

movita | Design Ts10 | Dekor Lindberg Eiche





Vorteile im Überblick

Schutz & Mobilität ohne FeM*

SafeFree® das patentierte Seitensicherungskonzept

| 8 - 9

Seitensicherungen - individuell nach Bedarf

SafeFree® Flex

| 10 - 11

Beitrag zur Dekubitusprävention

Liegeflächen-Ergonomie & Modularität

| 12

Flexibilität & Zeitersparnis

3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar

| 13

Übersichtlich. Ergonomisch. Intuitiv.

SafeControl® | Handschalter

| 14

Mobilität verbessern und erhalten

SafeLift | Revolutionäre Bettbedienung für den Bewohner

| 15

Manueller Mobilisierungs-Assistent

MobiStick 2

| 16

LED-Leuchten

soluna & lymera

| 17

Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik

| 18 - 19

Weitere Auswahl

Design | Farben & Dekore | etc.

| ab 20

Schutz & Mobilität ohne FeM*

SafeFree® das patentierte Seitensicherungskonzept

Das geteilte Seitensicherungssystem SafeFree® ist patentiert, freiwillig zertifiziert und die Technologie mehr als 1 Million mal praxiserprobt. Es ist bequem schnell und platzsparend in nur 2 Sekunden absenkbar und kann je nach Pflegesituation und Bewohnergröße individuell in 4 Höhenstufen eingestellt werden. Freiheit erhalten statt Freiheit entziehen, ganz im Sinne des Werdenfeller Wegs*².

1 Kein Schutz benötigt



Heruntergestellt bieten die geteilten Seitensicherungen neben wohnlicher Optik einen freien Zugang zum Bewohner für die täglichen Pflegeroutine. Störende Zubehöre wie Mittelposten oder fest angebrachte Seitenteile müssen nicht entfernt und verstaut werden.

2 Soft-Schutz (keine FeM*)



Zur Sicherheit bei Nacht genügt es oft, die Niedrigposition des Bettes mit der ersten Auszugsstufe der kopfseitigen Sicherung zu kombinieren. Das vermeidet unnötige Barrieren und reduziert das Sturzfolgerisiko dennoch nachhaltig. Der Bewohner erhält Orientierung, ohne eingeengt zu werden.

3 ¾-Schutz (keine FeM*)



So wird eine bewusste Ausstiegslücke am Fußende zur Reduzierung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM) bei gleichzeitig hohem Sicherheitsanspruch ermöglicht.

4 Vollschutz (FeM*) für Matratzen bis 18 cm



Die oberste Position dient zur umfassenden Absicherung des Bewohners. Beide Teile der Seitensicherung schließen so eng miteinander ab, dass sie genauso sicher wie ein durchgehendes Seitengitter sind und gehen so über die Norm IEC 60601-2-52 hinaus. Die Bevorratung von Zubehören zum Schließen einer Mittellücke bei der Fixierung mit Bauchgurten ist nicht notwendig.




Für höhere Matratzen ist eine weitere Erhöhung der Sicherungen von plus 6 cm einstellbar.




Videos zum Seitensicherungskonzept

Mehr Sicherheit kleine Mittellücke*³ < 60 mm

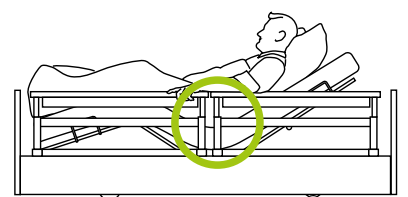


- Bewusste Erfüllung der Norm IEC 60601-2-52
- Sicherheit in Arbeitsposition, d.h. auch mit hochgestellter Rücken- bzw. Beinlehne
- Sicherheit ohne Verwendung eines zusätzlichen Mittellücken-Protektors als Zubehör bei der Fixierung mit Bauchgurten gemäß Empfehlung des BfArM*⁴

Pflegeerleichterung 4 geteilte Sicherungen = flexibler Zugriff

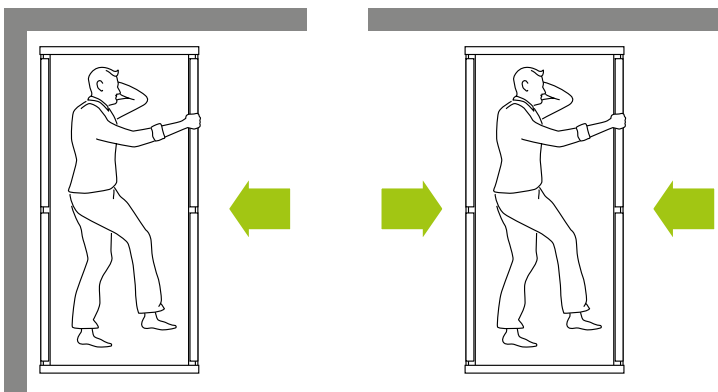

- Flexible Bettverwendung in Nischen bei Standardpflege oder für links/rechts aussteigende Bewohner zur Mobilisation
- Beidseitiger Zugriff bei erhöhtem Pflegebedarf
- Vermeidung von Folgekosten bei Nachrüstung von geteilten Seitensicherungen

Sicher mobilisieren unabhängig der Körpergröße

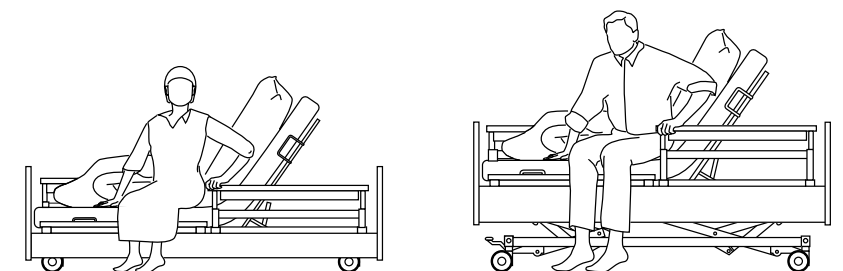

Die geteilte Seitensicherung kann sehr effektiv bei der Mobilisation eingesetzt werden, denn sie ist gut greif- und umfassbar. So dient sie als sichere Aufstieghilfe und fördert nachweislich die Mobilität des Bewohners.

*Freiheitsentziehende Maßnahmen | **vgl. „Argumentationshilfen zu unterschiedlichen Bettgittervarianten“ <http://werdenfeller-weg-original.de/medien> | ** Mittellücke = Abstand zwischen geteilten Seitensicherungen | **4 Information des BfArM (Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte) an die Fachkreise vom 08.07.2004 (Ref.-Nr. 913/0704)

Seitensicherungen - individuell nach Bedarf

SafeFree® Flex

Ergänzend zu fest montierten Seitenelementen bietet SafeFree® Flex individuell und zukunftsgerichtet so viel Freiheit wie möglich und so viel Schutz wie nötig. Dabei behält SafeFree® Flex den wohnlichen Designcharakter, der alle Pflegebetten aus dem Hause wissner-bosserhoff auszeichnet.

0
Kein Schutz benötigt



Komfortbett
ohne Seitensicherungen

1|2
Soft-Schutz (keine FeM*)



Mobilisierungshilfe
nur kopfseitige Elemente

3
 $\frac{3}{4}$ -Schutz (keine FeM*)



Wandschutz
mit fußseitigem Ausstieg

4
Vollschutz (FeM*) für Matratzen bis 18 cm



4 vollständig verstellbaren
Seitensicherungen

Safe

Vollständiger Schutz



- Sichere Befestigung der Elemente
- Verhindert ein unbeabsichtigtes Lockern oder Entfernen der Seitenelemente

Lückenlose Sicherheit



- Lückenschluss zwischen Seitenwange und Liegefläche
- Schutz vor Unfällen durch Verfangen oder Einklemmen

Flexible Mobilisierung



- Optimale Länge und individuell einstellbare Höhe der kopfseitigen Seitensicherungen
- Perfekter Hüftschutz beim Schlafen sowie komfortable und ergonomische Mobilisation des Bewohners



Free

Weniger FeM*




- Bewusstes „Weglassen“ von Seitensicherungen
- Investitionssicherheit für den Betreiber, Rechtssicherheit bzgl. FeM für das Pflegepersonal

Flex

Mehr Wirtschaftlichkeit


Werkzeuglose Anpassung der Seitenelemente

So flexibel die Anbringung der Seitenelemente ist, so flexibel kann das Budget eingesetzt werden, denn Sie bezahlen nur für die Elemente, die Ihre Bewohner auch wirklich benötigen.

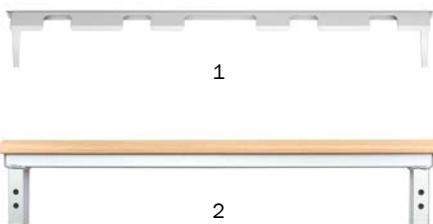

Kein Technikereinsatz nötig

Schnelle Umrüstung auf sich ändernde Bewohnersituationen – mit Lückenschluss ohne (1) und mit Handlauf (2) oder vollständig verstellbarer Seitensicherung (3)

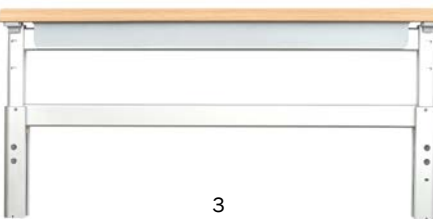

Profitieren Sie vom wohnlichen Design mit einer durchgehenden Seitenwange, unabhängig von der benötigten Mobilisierungs – bzw. Bewohnerschutzsituation:



Beitrag zur Dekubitusprävention

Liegeflächen-Ergonomie & Modularität

Der sogenannte doppelte Rückzug ist seit Jahren Bestandteil der wissner-bosserhoff Liegeflächen. Dabei wird nicht nur die Rückenlehne sondern auch die Beinlehne vom Sitzteil weg bewegt, so dass sich die Fläche vergrößert. Ergebnisse von Druckmessungen zeigen deutlich, dass die Druckbelastung beim doppelten Rückzug erheblich geringer ist als bei einer Standardliegefläche.

ca. 37,5 %

aller Bewohner in deutschen
Alten- oder Pflegeheimen
unterliegen einem
erhöhten **Dekubitusrisiko**

Quelle: Eigene Erhebung, wissner-bosserhoff 2020


ca. 2,7 Mio.

Menschen leiden
in Deutschland
an chronischen Wunden
wie **Dekubitus**


Quelle: Studie BVMed 2012

Unsere Lösungen

WIBO-Liegefläche mit
deutlicher Entlastung

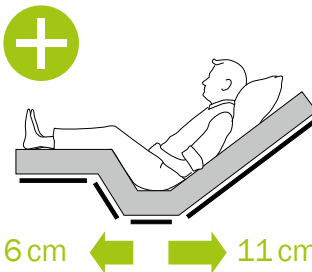


Doppelter Rückzug = Dekubitusprävention

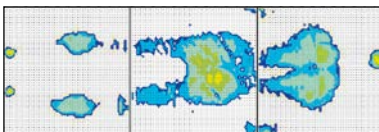


Thermografie der BiNetic-Liegefläche

Standard-Liegefläche
ohne Entlastung

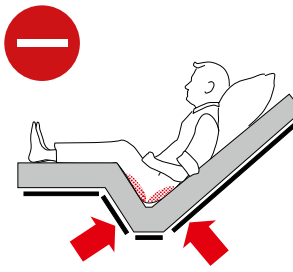


Einfacher Rückzug = Dekubitusrisiko

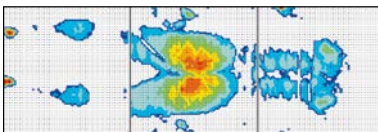


Thermografie einer Standard-Liegefläche


Modularität
3 verschiedene Liegeflächen

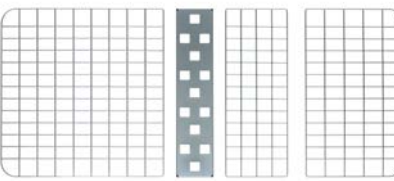

Drahtgitter Aero (Standard)
→ gute Durchlüftung

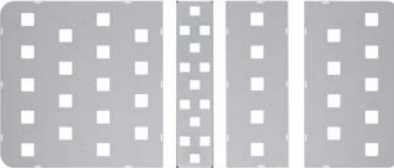

Kunststoffauflagen EasyClean
→ leicht zu reinigen

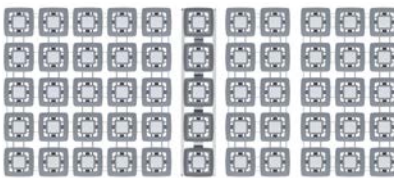

Komfort-Liegefläche mit 55 Federelementen
→ hoher Liegekomfort & einfache Druck-
entlastung


Flexibilität & Zeitersparnis

3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar

- Unsere Pflegebetten verfügen serienmäßig über eine integrierte Bettverlängerung
- Flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen
- Die Vorgaben der Norm IEC 60601-2-52 werden dabei in jeder Konfiguration eingehalten


200 cm

Bettlänge 200 cm:
Die geteilten Seitensicherungen bieten
Schutz ohne große Mittellücke* und
ohne Protektor

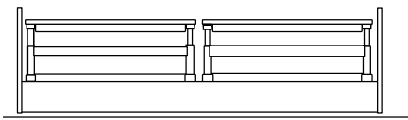


210 cm

Alternative Bettlänge 210 cm:
Schutz mit fußseitig längeren Seiten-
sicherungen ohne Zubehöre und
ohne Lücke > 318 mm**

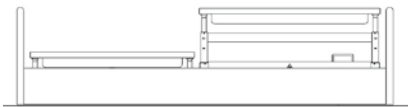

220 cm

Bettverlängerung auf 220 cm:
ist bei movita mit geteilten Seitensicherungen
temporär einstellbar – vollständiger Schutz
wird durch fußseitigen Protektor (Zubehör)
gewährleistet

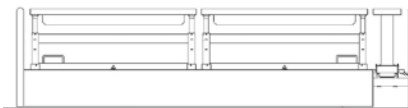



Vorteile bei Nacht

- SafeControl® Handschalter wird durch Bewegung aktiviert und zeigt alle wählbaren Funktionen an
- Unnötige Beleuchtung in der Nacht wird vermieden
- Rücksicht auf die Nachtruhe der Bewohner



Übersichtlich. Ergonomisch. Intuitiv.

SafeControl® | Handschalter



Neben Übersichtlichkeit und ergonomischer Formgebung besticht der SafeControl® Handschalter durch seine intuitive Bedienung. Dank Bewegungssensorik und gesteuerter Hintergrundbeleuchtung werden dem Bediener alle wählbaren Funktionen angezeigt und so eine einfache Bedienbarkeit vor allem auch bei Nacht gewährleistet.



3 Sicherheitsstufen

Über Tastenkombinationen lassen sich verschiedene Handschaltermodi einstellen:

Pflegemodus:

Alle Auswahlkosten freigegeben

Sperrmodus:

Alle Funktionen des Handschalters gesperrt

Bewohnermodus:

Die hellgrauen Auswahlkosten stehen dem Bewohner zur Verfügung

Durch die integrierte Sperrfunktion entfällt ein zusätzlicher Magnetschlüssel.

Komfort & Sicherheit

- Übersichtlich und ergonomisch
- Erstfehlersicher dank Vorauswahl
- Intuitive Bedienung
- Bewegungssensorik
- Hintergrundbeleuchtung
- Kein zusätzl. Schlüssel/ Zubehör notwendig
- Flexibler Einsatz durch langes Kabel

Mobilität verbessern und erhalten

SafeLift | Revolutionäre Bettbedienung für den Bewohner



SafeLift bietet einfachste Bedienung, sodass der Bewohner sein Bett selbstständig verstellen und in die für ihn optimale Mobilisationsposition bringen kann. Gleichzeitig kann er sich beim Aufstehen auf dem SafeLift-Controller abstützen. Dies fördert die Selbstmobilisation des Bewohners und reduziert Personalarufe zur Bettverstellung.



- Controller ohne Kabel oder Batterie
- Verstellkosten Betthöhe & Rückenlehne
- Große Tasten
- Gut erreichbare Position auf der SafeFree®-Seitensicherung
- GO-Taste (Schutz vor unbeabsichtigter Bettverstellung)
- 360° drehbar
- Ergonomisches Design
- Hohe Stabilität



Manueller Mobilisations-Assistent

MobiStick 2

Der MobiStick 2 ist eine clevere Bettbedienung für den Bewohner.
Durch seine ergonomische Form ist er leicht und intuitiv bedienbar und universell einsetzbar. Der Bewohner kann sich gut abstützen und selbst mobilisieren.



Durch seine ergonomische Form ist MobiStick 2 leicht und intuitiv bedienbar und universell einsetzbar. Der Handknopf ist drehbar und verfügt über eine einfache Arretierung.



Bei Nichtgebrauch lässt er sich einfach wegklappen und ist somit nicht im Weg, aber schnell einsatzbereit wenn er benötigt wird.

**Werkzeuglos
und flexibel**

MobiStick 2 lässt sich
werkzeuglos auf beiden Bettseiten
anbringen, ist für jede Bewohner-
größe geeignet und ist nach-
rüstbar für wissner-bosserhoff
Betten ab 2004.



LED-Leuchten

soluna & lymera

Besondere Designelemente der Leuchten sind die wellenförmigen bzw. transparenten Lampenschirme mit dem teilweise transluzenten Charakter. Ausgestattet mit einem schwenkbaren Arm ermöglichen unsere Leuchten die genaue Positionierung des Lichtpunktes in der Nähe des Objekts, welches beleuchtet werden soll.



Komfort-LED-Leseleuchte lymera

Vorteile der LED

- Lange Lebensdauer
- Geringer Energiebedarf
- Keine Wärmeentwicklung
- Sichere Funktionsweise



Design-LED-Leuchte soluna
mit gewelltem Lampenschirm



Sicherheit bei Tag & Nacht

SafeSense® die intelligente Bed-Exit-Sensorik



Mit uns haben Sie einen verlässlichen Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM): Mit SafeSense® präsentiert wissner-bosserhoff ein Assistenzsystem mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FeM* unterstützt.



Nachtlicht-Automatik

- Nachtlicht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachtlicht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt

Individuelle Rufmeldung

- Von 0 Sek. Sofortruf bis 30 Min. flexibel und stufenlos einstellbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners


Integriert + Nachrüst-Kit

- Zubehör-Option für unsere aktuellen Pflegebetten
- Nachrüst-Kit für unsere elektrischen Pflegebetten ab 2002
- Als Funk- oder Kabellösung erhältlich

Mehr Sicherheit - weniger FeM*


- Schnelle Reaktionszeit bei Stürzen
- Hohes Sicherheitsniveau bei Nacht- und Wochenendschichten
- Weniger Kontrollgänge
- Ideal in Kombination mit movita Pflegebetten und SafeFree®-Seitensicherung

Mehr
Sicherheit –
weniger FeM*

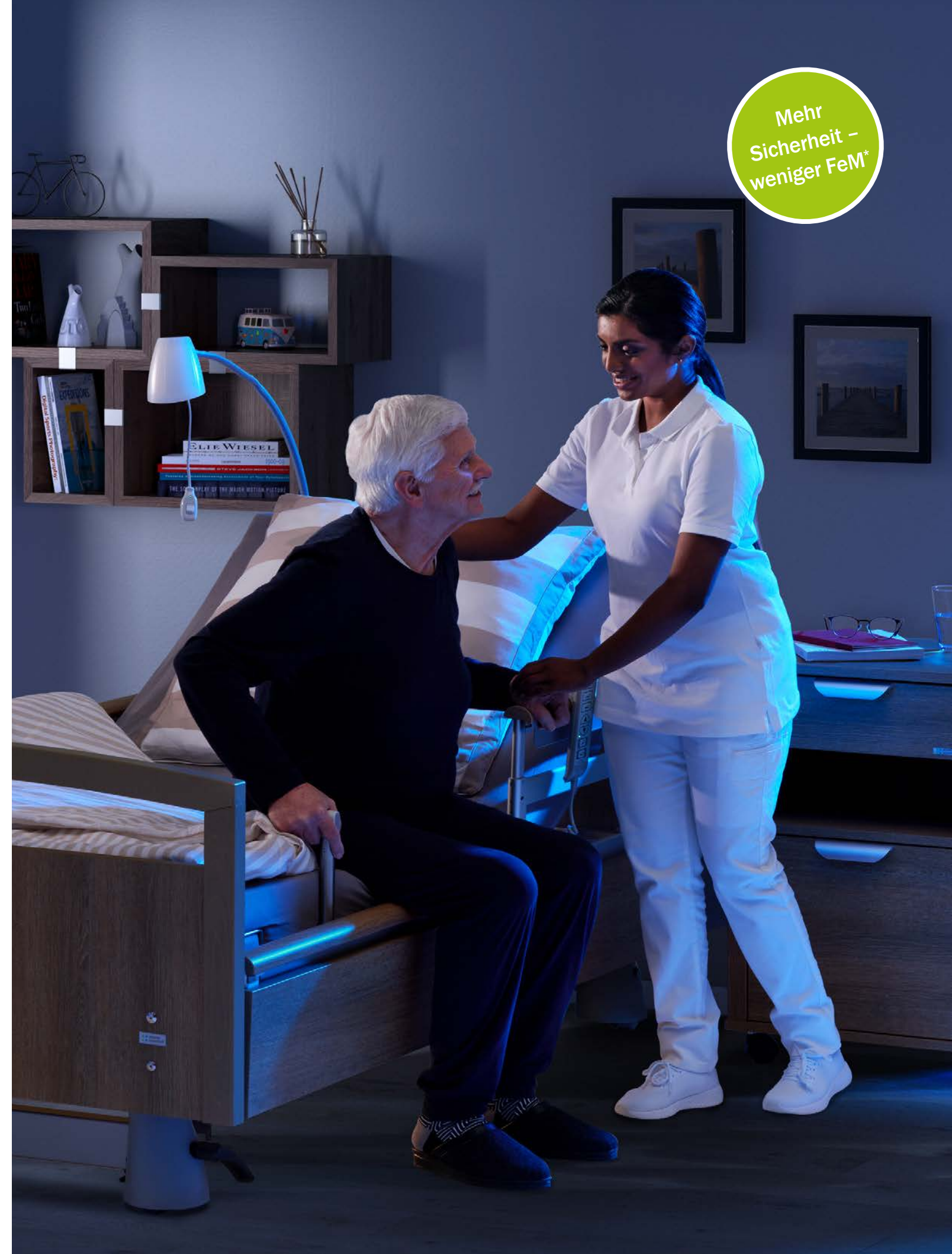


Farben | Dekore* | Softcover

Farben | Dekore*

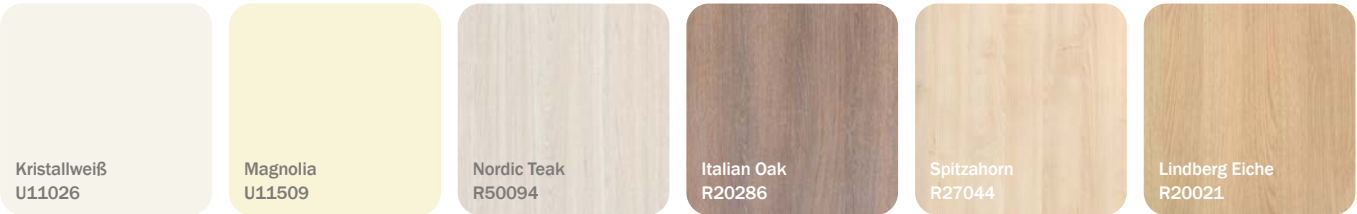

Kombinations-
möglichkeiten

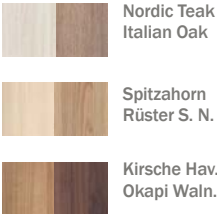

Kunstleder | Softcover für Kopf-/Fußteil Df*



Stoff | Softcover für Kopf-/Fußteil Df*



Softcover – Preiswert und flexibel

Alle gezeigten Stoff- und Kunstlederdekore sind auch als Hussen erhältlich, die Sie einfach und werkzeuglos selbst auf den Kopf- und Fussteilen* Ihrer Pflegebetten anbringen können. Die Softcover sind extrem strapazierfähig, nässe- und schmutzresistent, wasserabweisend und atmungsaktiv.



Design | Kopf-/Fußteile

Kopfteil



Design A
Kopf-/Fußteil



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design Ts

Fußteil



Design Ak
Kopf-/Fußteil



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design Ts

Flaches Fußteil



Design Ak
abgeklappt



Design Dfx



Design Gx



Design Kx



Design Ox



Design Tsx

Sicherheit

Das Unternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der ISO 9001 für Qualitätsmanagement-Systeme, DIN EN ISO 13485 für die Herstellung von Medizinprodukten sowie ISO 14001 für Umweltmanagment. wissner-bosserhoff lässt zusätzlich regelmäßig seine Fertigungsprozesse und das Management vom TÜV Süd auditieren.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



CB-Zertifikat für
Produktsicherheit,
TÜV Süd



Gutachten zu
Seitensicherungen



Wir haben die Treibhausgasemissionen, die durch die Tätigkeiten unseres Unternehmens verursacht werden, erfassen lassen** und durch den Erwerb von Klimaschutzzertifikaten für die Jahre 2022 und 2023 ausgeglichen.

Nachttische und weiteres Zubehör

finden Sie in Extra-Prospekten oder unter www.wi-bo.de





wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Deutschland

Tel. +49 2377 784-0 | info@wi-bo.de | wi-bo.de



Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Schweiz

Tel. +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

Members of LINET Group

