

■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff

Funktional. Intelligent. Menschlich.

## sentida 7-i connect

Das digitale Niedrigpflegebett



# Das vernetzte Pflegebett

Wie digitale Technologie die Pflege nachhaltig entlastet

# sentida 7-i



## Digitalisierung mit sentida 7-i

360° vernetzte Pflege Zeit im Wert von bis zu zwei Vollzeitkräften gewinnen	4 - 5
10 gute Gründe Mit sentida 7-i digital durchstarten	6 - 7
1 Pflegedokumentation live Direkteingabe statt Zettel	10
2 Systemsicherheit Integrierbares System mit Zugangsmanager	11
3 Gewichts-Monitoring mit Touchscreen Zeitgewinn durch Wiegen im Bett	12
4 BMI Check Früherkennung von Unterernährung bereits vor der Arztvisite	13
5 Bed-Exit-Manager Frühwarnsystem bereits vor dem Bettausstieg	14
6 Connectivity Bereit für Ihre Infrastruktur	15
7 Multiruf Qualifizierte Rufe für die richtigen Prioritäten	15
8 Sicherheitssensorik Zum Wohle Ihrer Bewohner	16
9 Mobi-Lift® Zur Selbstmobilisation	17
10 Feuchtigkeits-Assistent Sensorische Auflage mit Ruf-Funktion	18

## Weitere Vorteile des sentida 7-i

Bewohnerkomfort und -sicherheit SafeControl – beleuchteter Design-Handschalter	19
Versorgung in der Intensiv- & Schwerstpflege Akutpflege-Paket	20
Effektive Dekubitusprävention Liegeflächen-Ergonomie   Doppelter Rückzug	21
Schutz & Mobilität ohne FeM* SafeFree® Seitensicherungskonzept	22 - 23
Sicher Pflegen, Mobilisieren & Schlafen 3-Stopp-Strategie	24
Flexibilität & Zeitersparnis 3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar	25

## Modelle & Designs

2 Modelle zur Wahl	28
2 Leuchten	29
CareBoard® 2 Positionen zur Wahl	28
Farben   Dekore   Softcover	30 - 31
Design   Kopf-/Fußteile	32
Ausstattungen & Zubehör	33 - 35

# 360° vernetzte Pflege

Entlastung des Pflegepersonals & Gewinn wertvoller Pflegezeit\*

Digitalisierung und Pflegenotstand sind die vieldiskutierten Schlagworte – sentida 7-i heißt die Antwort.

Das digitale Pflegebett sentida 7-i versorgt Sie mit verlässlichen Lösungen zur Entlastung Ihres Pflegepersonals und zum Wohle Ihrer Bewohner gewinnen Sie wertvolle Pflegezeit. Wie z. B. durch das neue Pflegedokumentations-Tool direkt am Bett oder der Eingabe und Übertragung am CareBoard®. Ebenso durch die integrierte Bettwaage, die im Vergleich zur Umlagerung in einen Transportstuhl mit anschließendem Transfer zur Waage bis zu 15 Minuten Zeit pro Wiegevorgang spart.


In der Summe bedeutet dies bei 100 Bewohnern einen Zeitgewinn von bis zu 3.400 Stunden pro Jahr. Das ist wertvolle Pflegezeit zum Wohle Ihrer Bewohner.

Die neuen digitalen Funktionen entlasten also nicht nur die Pflege, sondern tragen zu einer höheren Wirtschaftlichkeit Ihrer Einrichtung bei. Sie verwenden höchste Sicherheitsstandards und sparen wertvolle Pflegezeit zugunsten Ihrer Bewohner ein – für eine menschliche Pflege 4.0.



# 10 gute Gründe

Jetzt mit sentida 7-i digital zu starten

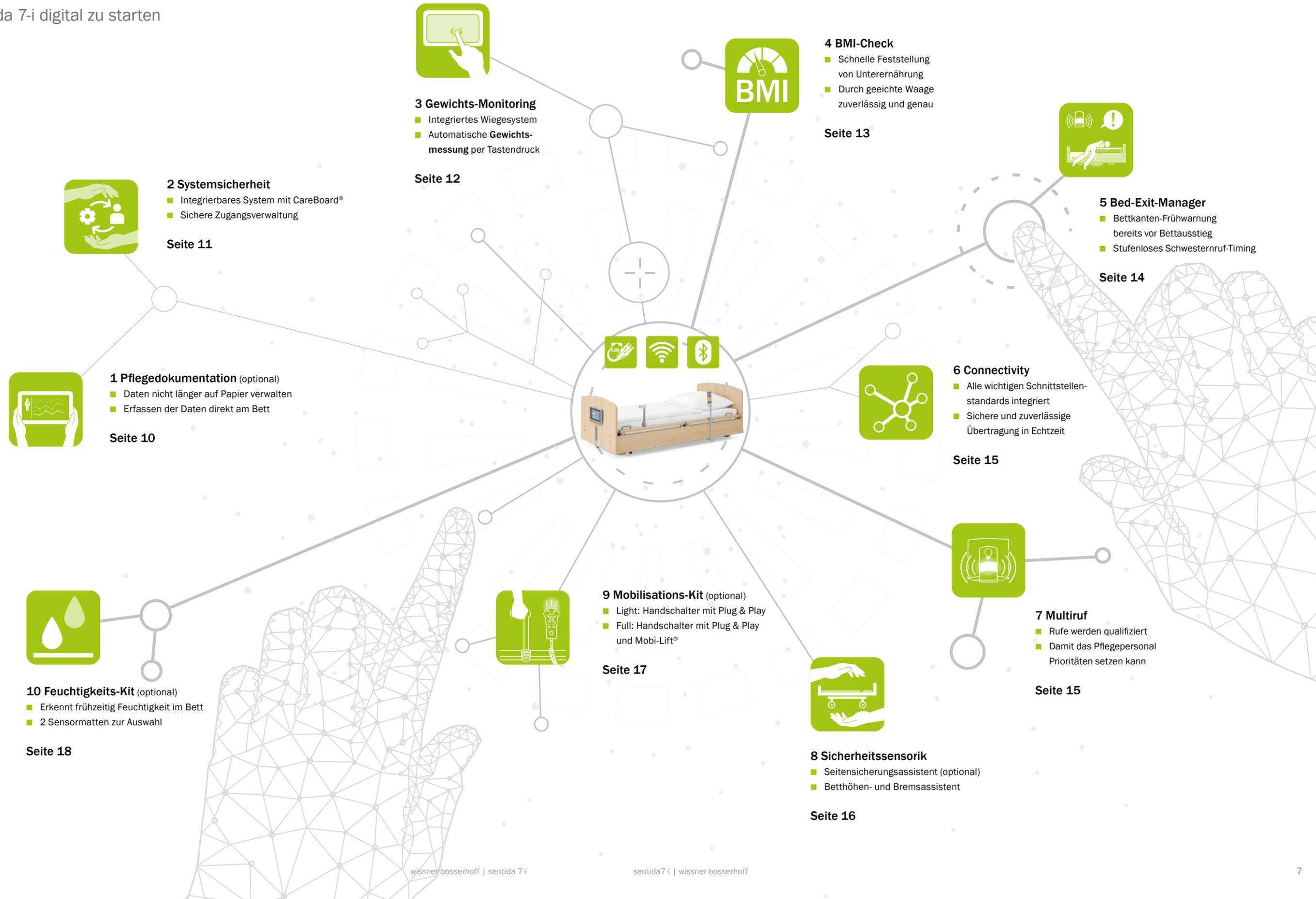



## Wohnidee Forest

sentida 7-i | Design Df | Dekor Cottage Pinie + Stoffhülle Kunstleder silbergrau



# 1 | Pflegedokumentation live (optional)

Direkteingabe statt Papierflut

Die umfangreiche Funktionalität des sentida 7-i ist leicht bedienbar im CareBoard® integriert. Mit dem 7"-LCD-Touchscreen für das Pflegepersonal ist es gelungen, die funktionale Vielfalt in übersichtlichen Menüs zu ordnen und dem Anwender die tägliche Pflege zu erleichtern.



Video

- Einfache und intuitive Bedienung durch übersichtliche Menüs
- Energiesparmodus: Automatische Abschaltung nach ca. 10 Minuten
- Hohe Sicherheit: Log-In Menü nur für die Pflegekräfte. Einfacher Log-Out über die STOP-Taste
- Zugang durch individuelles Passwort (z. B. aus der Pflegedokumentation)
- Display OFF über die Safety-GO-Sicherheitstaste mit automatischen Log-Out nach ca. 10 Minuten



**NEU!**  
Integrierter Fallschutz



- Daten müssen nicht länger auf Papier verwaltet werden.
- Sie sparen pro Dokumentationsvorgang bis zu 5 Minuten.

**Gewinnen Sie wertvolle Pflegezeit zum Wohle Ihrer Bewohner.**

Im Menü **Pflegerroutine** können schnell und einfach die wichtigsten Vitaldaten\* wie Blutdruck, Puls, Temperatur oder der Blutzucker erfasst werden. Darüber hinaus bieten übersichtliche Kurz-Checklisten die Möglichkeit, täglich anfallende Lagerungs- und Ernährungsprotokolle einzutragen. Mit **Save&Send** werden die Daten direkt zum Server der Pflegesoftware übermittelt.



Mit „**Save&Send**“ einfaches Abspeichern und Senden der Gewichts- und Vitaldaten des Bewohners\*



# 2 | Systemsicherheit


Integrierbares System mit Zugangsmanager



Mit sentida 7-i setzt wissner-bosserhoff neue Maßstäbe in puncto Sicherheit und Pflegeerleichterung und zeigt, dass es auch ohne virengefährdete Smartphone-/Tablet-Apps oder unsichere Internet-Cloud-Lösungen geht. Es handelt sich um ein **integrierbares Steuerungssystem mit CareBoard®**, das bedeutet keine Viren oder negativen Fremdeinwirkungen durch andere Software oder Apps. Die permanente Kabelverbindung des CareBoard®s sorgt darüber hinaus für eine jederzeitige Anwendersicherheit im Sinne des Medizinproduktgesetzes.



Noch mehr Sicherheit gewährleistet die Zugangsverwaltung mit unterschiedlichen Benutzerrechten durch individuelle Passwörter. Sensible Betteinstellungen können nur von berechtigten Personen vorgenommen werden. Das versehentliche Ausschalten einer wichtigen Überwachungsfunktion ist also ausgeschlossen.

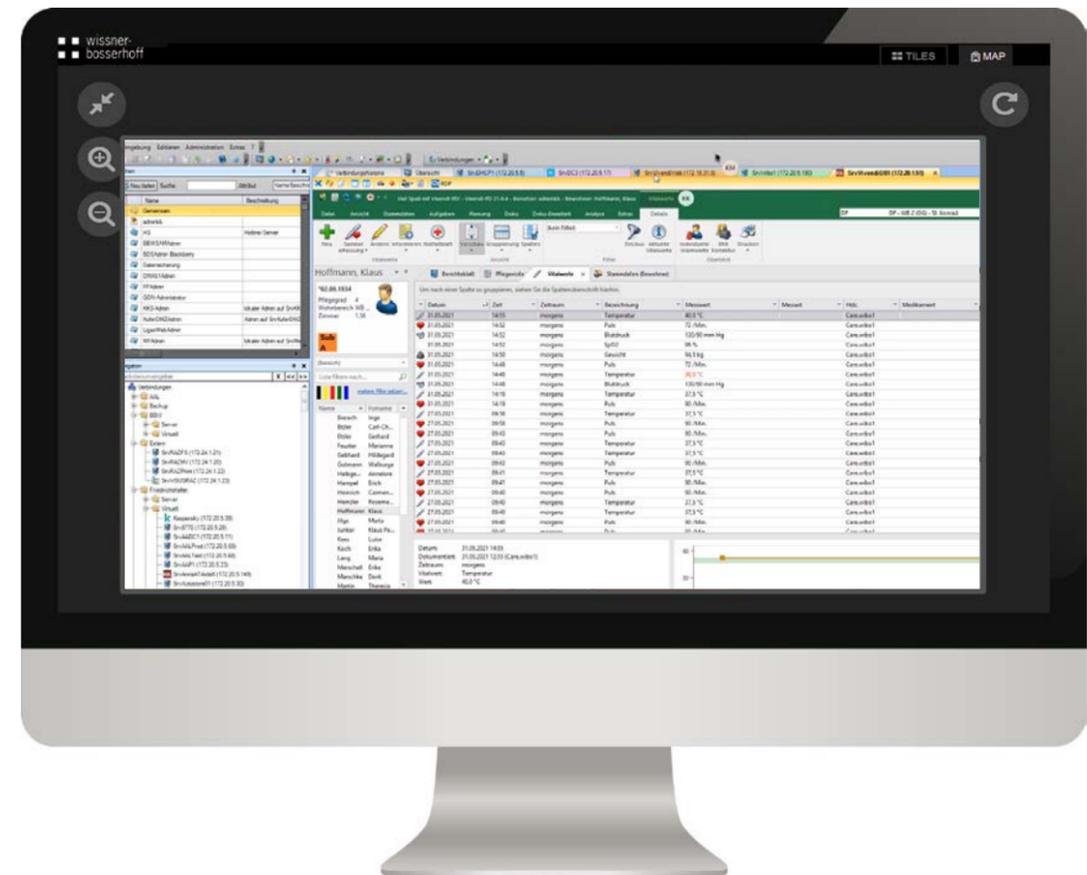

Video

# 3 | Gewichts-Monitoring mit Touchscreen

Zeitgewinn durch Wiegen im Bett


Die im Bett integrierte, geeichte Waage unterstützt das Pflegepersonal ohne aufwändigen Lifter- oder Rollstuhleinsatz und sorgt so für eine komfortable und menschenwürdige Gewichts- erfassung für die Dokumentation. Zusätzlich kann der abgespeicherte und im Wochen- oder Monatsrhythmus angezeigte Gewichtsverlauf die medizinische Versorgung verbessern und zusätzliche Rückschlüsse für die Dosierung von Medikamenten oder für die Beurteilung bei Lymphstau in den Beinen liefern. **Dank der Funktionalität „Save&Send“ stehen die Gewichts- daten zeitnah in der Pflegedokumentation zur Verfügung.**



Save&Send



Video

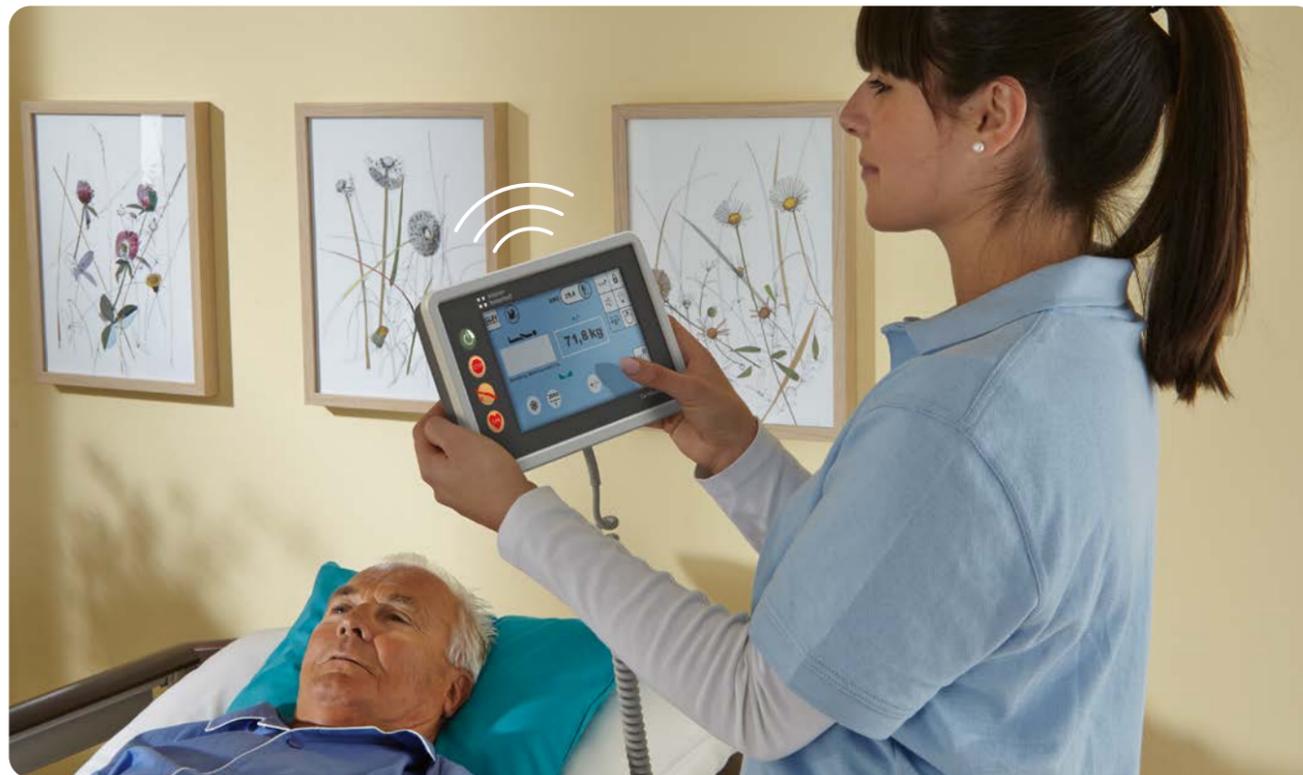

**Wiegen mit Zubehören ist kraft-, zeit- und kostenintensiv**

- 2 Pflegekräfte und Hilfsmittel nötig
- Stress für Bewohner
- Mehrfache Umlagerungen



**Vorteile der integrierten, geeichten Waage**

- Gewichtsanzeige und absolute Gewichtsveränderung
- Erfassung unmittelbar im Bett ohne Umlagerung
- Freeze-Funktion zum Ausblenden von Gewichtseinflüssen (z. B. Zubehör)
- Übertragung per WLAN in die Pflegedokumentation durch Save&Send Funktion
- Zeitgewinn bis zu 15 Minuten je Wiegevorgang

(Quelle: Eigene Berechnungen)

**Gewinnen Sie wertvolle Pflegezeit zum Wohle Ihrer Bewohner.\***

# 4 | BMI Check

Früherkennung von Unterernährung bereits vor der Arztvisite

Veränderungen im Ess- und Trinkverhalten führen im Alter oft unbemerkt zu einer nicht bedarfsdeckenden Energieaufnahme, das Körpergewicht verringert sich, zum Teil bis hin zu starkem Untergewicht (Altersanorexie). Gleichzeitig sind die Betroffenen dabei oft unterversorgt an essentiellen lebensnotwendigen Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen. Der Body Mass Index (BMI) erlaubt eine schnelle Feststellung von Unterernährung für den behandelnden Arzt. Beim sentida 7-i lässt sich der BMI im CareBoard® direkt auswerten.



Video

**Im geltenden Pflege-TÜV ist die Überwachung des Ernährungszustandes Ihrer Bewohner ein wichtiger Indikator für die Qualität Ihres Pflegeheimes.**




**Früherkennung von Unterernährung durch täglichen BMI-Check**

- Mit der integrierten Bettwaage von sentida 7-i haben Sie jederzeit die volle BMI-Kontrolle.
- BMI-Klassen erlauben eine schnelle Feststellung von Unterernährung für den behandelnden Arzt (in der Pflege für gewöhnlich ein BMI < 19).
- Täglicher BMI-Check lässt Rückschlüsse auf den allgemeinen Bewohnerzustand zu.
- BMI Ermittlung basiert auf geeichtem Waagesystem und ist damit sehr zuverlässig und genau.
- Zur Sicherheit Ihrer Bewohner und zum Wohle Ihrer Angehörigen.



Body Mass Index

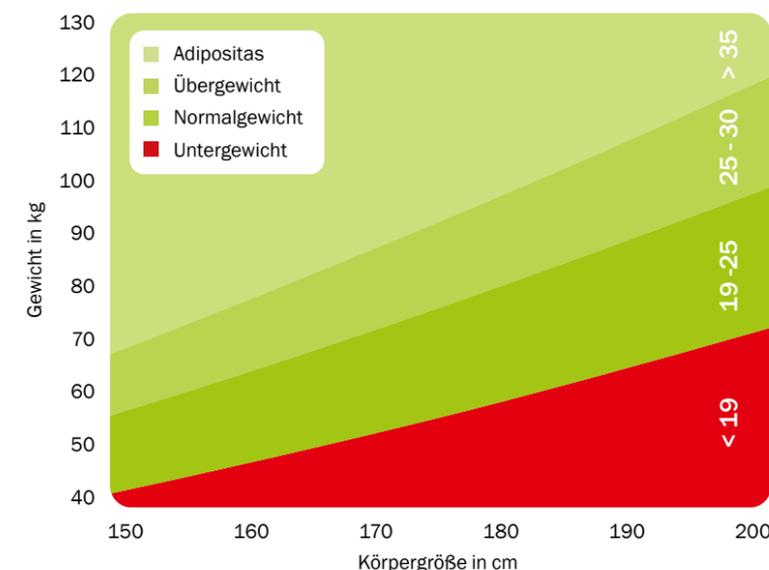

**Rund 50%**  
 der über 65-jährigen Heimbewohner mit Normalgewicht sind von Unterernährung gefährdet!  
 Der BMI kann schleichend in den roten BMI-Bereich abrutschen!

Quelle: BMI-Beurteilung ab 65 Jahren, Jem - Journal für Ernährungsmedizin, 2006, S. 16

# 5 | Bed-Exit-Manager

Frühwarnsystem bereits vor dem Bettausstieg

wissner-bosserhoff ist Ihr verllässlicher Partner bei der Vermeidung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM). Mit dem sentida 7-i präsentiert das Unternehmen ein Pflegebett mit intelligenter Sensorik, das Tag und Nacht zuverlässig bei der Reduzierung von FeM unterstützt. Es ist mit einer Nachtlcht-Automatik ausgestattet, die beim Bettausstieg aktiviert wird und erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt. Das sentida 7-i ist kompatibel mit nahezu allen marktgängigen Schwesternrufsystemen.

Im geltenden Pflege-TÜV ist Sturzprävention ein wichtiger Indikator für die Qualität Ihres Pflegeheimes.



**Bettkantenruf mit Frühwarnsensor** – Bestmögliche Sturzprävention durch Rufsignal vor Verlassen des Bettes



**Bett-Exit-Rufmeldung** – Zur schnellen Reaktion beim Verlassen des Bettes


## Nachtlcht-Automatik

- Nachtlcht wird automatisch beim Bettausstieg aktiviert
- Nachtlcht erlischt, wenn der Bewohner wieder im Bett liegt
- NEU: Unterschiedliche Verzögerungszeiten flexibel einstellbar



## Flexibles Schwesternruf-Timing

- Bed-Exit von 0 Sek. Sofortruf bis 30 Min. stufenlos einstellbar
- NEU: Für die Aktivierung sind bis zu fünf Zeitintervalle verfügbar
- Anpassung an die Mobilität des Bewohners
- Bettkantenruf bei bettflüchtigen Bewohnern. Pflegepersonal wird bereits gerufen, wenn der Bewohner droht aus dem Bett zu fallen

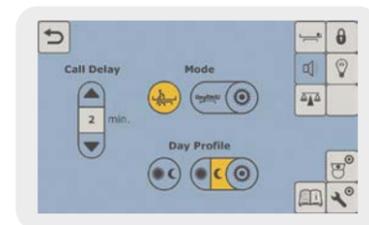

### Mehr Sicherheit – weniger FeM

- Weniger Kontrollgänge insb. bei Nacht- und Wochenendschichten
- Konsequente Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Initiative gegen Fixierung „Werdenfelser Weg“
- Einsparungen bis zu 90€ pro Bett und Jahr

(Quelle: Eigene Berechnungen)

# 6 | Connectivity

Bereit für Ihre Infrastruktur

Das digitale Pflegebett sentida 7-i hat alle wichtigen Schnittstellenstandards integriert und nutzt zur Übertragung der Bewohnerdaten bewährte Standardprotokolle aus dem Gesundheitswesen. So ist eine sichere und zuverlässige Übertragung der Bewohnerdaten in nahezu Echtzeit garantiert, wodurch die Pflegekräfte Zeit einsparen und deutlich entlastet werden.

NEU: Eine sogenannte Middleware macht die Datenübertragung vom Bett zur Pflegesoftware jetzt noch einfacher. Alle gängigen Schnittstellen-Standards und Datenformate werden unterstützt. Darüber hinaus können weitere Drittsysteme an den neuen Connector angebunden werden.




**Ready for SafeSense® 3**  
Entdecken sie unseren digitalen Pflege-Assistenten für ein optimales Bewohner-Monitoring.

# 7 | Multiruf

Qualifizierte Rufe für die richtigen Prioritäten

Egal ob der Bed-Exit-Bettkantenruf, Seitensicherungs-Assistent oder Feuchtigkeitssassistent aktiviert sind. Über den **multifunktionalen Ruf** ist es möglich, Rufe zu differenzieren und zu priorisieren. Dadurch weiß die Pflegekraft sofort, welcher Bewohner am dringendsten Hilfe benötigt.

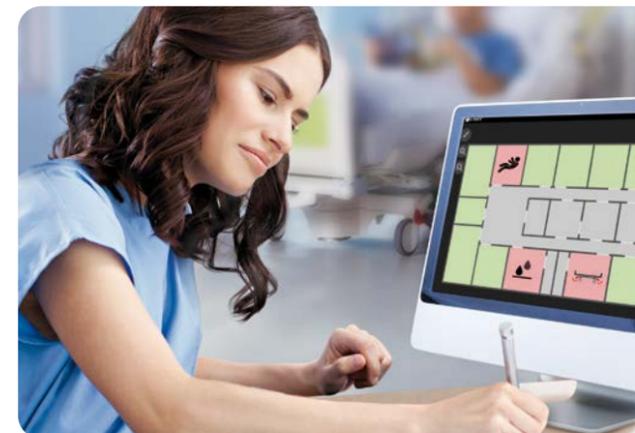

## Bewohnerzustände



- Bettkanten-Frühwarnung bereits vor dem Bettausstieg
- Bed-Exit mit bewohnerindividueller Rufverzögerung
- Tag- und Nachtmodus



- Mazerationsschutz durch frühzeitige Feuchtigkeitserkennung im Bett
- Baumwoll- oder Kunststoffmatte (Zubehör)
- Stärkung der Würde des Bewohners

## Bettzustände




- Free-Mode zur FeM-Vermeidung
- Safe-Mode zur Absicherung einer genehmigten FeM während der Nacht
- Bethöhen- und Brems-Assistent
- Mazerationsschutz durch frühzeitige Feuchtigkeitserkennung im Bett

## 8 | Sicherheitssensorik (optional)

Zum Wohle Ihrer Bewohner

Drei Sensorik-Assistenten sorgen für ein höheres Sicherheitsniveau rund um das Pflegebett. Die integrierte Sensorik sendet einen Multiruf, sobald ein aktivierter Assistent einen unsicheren Bettzustand meldet und trägt so zur Vermeidung von Unfällen durch Stürze bei.

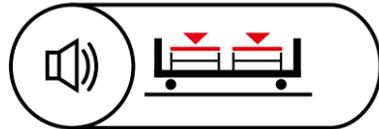

### Der Seitensicherungs-Assistent (optional)


mit den beiden Modi Free & Safe:

**Free-Modus:** Der Seitensicherungs-Assistent meldet automatisch versehentlich hochgestellte Seitensicherungen. So können nicht genehmigte Freiheitsentziehende Maßnahmen (FeM) verhindert werden. Verfahrenspfleger nach dem „Werdenfelder Weg“ werden so wirkungsvoll unterstützt.

**Safe-Modus:** Im Safe-Modus trägt der Seitensicherungs-Assistent zu mehr Sicherheit bei sehr aktiven Bewohnern bei und sichert eine genehmigte FeM ab. Eine bewusste oder unbewusste Deaktivierung der Bettseitensicherung wird der Pflegekraft ebenfalls automatisch gemeldet.




Der **Betthöhen-Assistent** verständigt das Pflegepersonal, wenn die eingespeicherte Betthöhe verändert wird. So wird vorgesehen, dass z. B. die Niedrigposition bei Nacht und die beste Transferposition bei Tag eingestellt ist und damit ein wesentlicher Beitrag zur Sturzprävention geleistet.

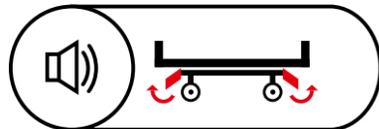

Der **Brems-Assistent** signalisiert, wenn nach einem Pflege- oder Reinigungsvorgang die Bremse gelöst und nicht wieder festgestellt wird.

### Monitoring-Zustände

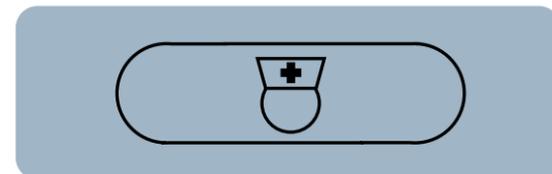

Mit dem Pflegemodus wird der Ruf quittiert und ungewollte Rufe unterdrückt. Er trägt zur effizienten Versorgung der Bewohner bei und schaltet sich nach ca. 10 Minuten wieder automatisch aus.

## 9 | Mobi-Lift® (optional)

Zur Selbstmobilisation



### Mobi-Lift®

- Abklappbar
- Ergonomisch
- Stabil

### Immobilitätssyndrom

Ist eine Person bettlägerig, sind ihre Bewegungen eingeschränkt. Wird dieser Mobilitätseinschränkung nicht entgegengewirkt, entsteht das so genannte Immobilitätssyndrom

#### RISIKEN:

- Thrombosegefahr
- Dekubitusgefahr
- Verwirrtheit

(Quelle: Pflegeassistent: Lehrbuch für Gesundheits- und Krankenpflegehelfer und Altenpflege, Thieme Verlag)



### Selbstmobilisation mit Mobi-Lift®

- Beidseitig integrierte Aufstehhilfe
- Elektrische Höhenverstellung
- Förderung und Erhaltung der Mobilität
- Entlastung des Pflegepersonals

# 10 | Feuchtigkeits-Assistent (optional)

Sensorische Auflage mit Ruf-Funktion

Befindet sich Feuchtigkeit im Bett, wird ein stiller Alarm an das Monitoring-System von SafeSense® 3 übermittelt und bei Bedarf auch ein Ruf an die im Haus vorhandene Rufanlage. Der Feuchtigkeits-Assistent erkennt frühzeitig Feuchtigkeit im Bett und trägt zum besseren Schutz der Bewohner vor Mazeration und Dekubitus bei.



Baumwoll-Sensorlaken (Artikel 50-0938), bei 95° C waschbar

Baumwollflanell für mehr Liegekomfort



Druckknöpfe für einfache Handhabung



Rund **75%** aller Bewohner von Alten- und Pflegeheimen leiden unter Inkontinenz

Absolut sind das rd. **675.000** Bewohner in deutschen Pflegeeinrichtungen

(Quelle: www.bvmed.com vom 01.03.2019)

**Inkontinenzschutz**

- Frühzeitige Erkennung von Feuchtigkeit im Bett
- Verringerung von Hautdefekten durch kurze Liegezeit in Nässe
- Gewissheit durch Echtzeit-Informationen anstatt manueller Kontrolle
- Höheres Wohlbefinden des Bewohners

# Bewohnerkomfort und -sicherheit

SafeControl – beleuchteter Design-Handschalter

Der Design-Handschalter SafeControl besticht auf den ersten Blick durch seine Übersichtlichkeit und ergonomische Formgebung. Große und erhabene Tasten sind übersichtlich angeordnet und ermöglichen eine leichte Bedienung insbesondere auch bei Nacht, durch ein **beleuchtetes Bedienfeld**.

- LED: Sperrung der Oberschenkellehne/Rückenlehne
- Links: Höhe einstellen
- Rechts: Autokontur einstellen
- LED: Sperrung der Höhenverstellung
- LED-Strahler ein- und ausschalten
- Links: Oberschenkellehne einstellen
- Rechts: Rückenlehne einstellen
- Safety-GO-Sicherheitstaste

**Erweiterte Funktionen**

- Einfache und übersichtliche Bedienung
- Hintergrundbeleuchtung
- Integrierter LED-Strahler
- Separate Beinlehnenverstellung
- Plug&Play für schnellen Bettanschluss (Standard)

# Versorgung in der Intensiv- & Schwerstpflege

## Akutpflege-Paket

Die Sicherheit und Erfüllung der Norm IEC 60601-2-52, sowie der pflegerische Nutzen stehen an erster Stelle. Das Pflegebett sentida 7-i bietet vorprogrammierte Notfall- und Therapiepositionen, die auch dann ausgelöst werden können, wenn der LCD-Touchscreen ausgefallen ist.



Die Not-Stopp-Taste stoppt sofort ungewollte Bettbewegungen und nimmt das Bett umgehend vom Netz. Elektrische CPR- und Trendelenburg-Automatik können schnell durch einen einfachen Tastendruck ausgeführt werden.

Das Bett verfügt standardmäßig über einen Akku. Alle Notfallfunktionen sind auch bei netzunabhängigem Betrieb aktiviert. Die Pflegekraft kann über eine mechanische CPR die Rückenlehne per einfacher Handbedienung absenken (Option).



Safety-GO-Sicherheitstaste und Display OFF



Not-Stopp-Taste und Log-Out



Trendelenburg-Automatik-Taste




CPR-Automatik-Taste

# Effektive Dekubitusprävention


## Liegeflächen-Ergonomie | Doppelter Rückzug

Die ergonomische Aufteilung der Liegefläche trägt zur Vermeidung von Druckbelastungen und damit zur Dekubitusreduzierung bei. Die Maße der 4-geteilten Liegefläche von wissner-bosserhoff Pflegebetten orientieren sich an der durchschnittlichen Körpergröße eines Menschen. Auf Basis der Erkenntnisse

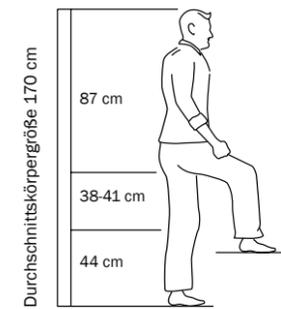

Anthropometrie nach Prof. Eigler\*

von Prof. Eigler\* wird ersichtlich, dass der Rückenlehnenbereich zur wirksamen Unterstützung der Halswirbelsäule mindestens 80 cm lang sein sollte. Eine zusätzliche Reduzierung von Druckbelastungen erreicht die BiNetic-Liegefläche bei überdurchschnittlich großen Bewohnern durch seine integrierte

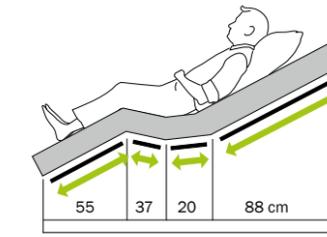


BiNetic-Liegefläche 200 cm (lange Rückenlehne)

3 Liegeflächen  
s.S. 34


## Doppelter Rückzug der Liegefläche – sicher und komfortabel Mobilisieren im Bett

— Standard-Liegefläche ohne Entlastung

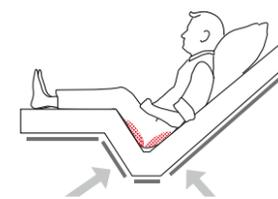

Einfacher Rückzug = Dekubitusrisiko

+ WIBO-Liegefläche mit deutlicher Entlastung

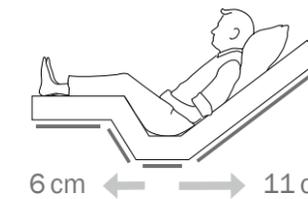

Doppelter Rückzug = Dekubitusprävention

Doppelter Rückzug = 17cm mehr Platz im Bett!

### Der Doppelte Rückzug

- optimiert die Auflagefläche im Sitzbereich, da die Fläche von Rücken- und Oberschenkellehne vergrößert wird,
- kann eine Druckentlastung auf sensible Körperbereiche wie das Gesäß und das Steißbein erhöhen,
- kann die Atmung erleichtern, da mehr Raum durch eine entspannte Sitzposition im Brust- und Bauchbereich geschaffen wird,
- bietet in Kombination mit der langen Rückenlehne von fast 90 cm eine präventive und komfortable Positionierung von immobilen Bewohnern/Patienten.

# Schutz & Mobilität ohne FeM\*

## SafeFree® Seitensicherungskonzept

Das geteilte Seitensicherungssystem SafeFree® ist patentiert, freiwillig zertifiziert und die Technologie mehr als 1 Million mal praxiserprobt. Es ist bequem schnell und platzsparend in nur 2 Sekunden absenkbar und kann je nach Pflegesituation und Bewohnergröße individuell in 4 Höhenstufen eingestellt werden. Freiheit erhalten statt Freiheit entziehen, ganz im Sinne des Werdenfelser Wegs\*<sup>2</sup>.

### 1 Kein Schutz benötigt



Heruntergestellt bieten die geteilten Seitensicherungen neben wohnlicher Optik einen freien Zugang zum Bewohner für die täglichen Pflegeroutine. Störende Zubehöre wie Mittelpfosten oder fest angebrachte Seitenteile müssen nicht entfernt und verstaut werden.

### 2 Soft-Schutz (keine FeM\*)



Zur Sicherheit bei Nacht genügt es oft, die Niedrigposition des Bettes mit der ersten Auszugsstufe der kopfseitigen Sicherung zu kombinieren. Das vermeidet unnötige Barrieren und reduziert das Sturzfolgerisiko dennoch nachhaltig. Der Bewohner erhält Orientierung, ohne eingeeignet zu werden.

### 3 ¾-Schutz (keine FeM\*)



So wird eine bewusste Ausstiegslücke am Fußende zur Reduzierung von Freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM) bei gleichzeitig hohem Sicherheitsanspruch ermöglicht.

### 4 Vollschutz (FeM\*) für Matratzen bis 18 cm




Die oberste Position dient zur umfassenden Absicherung des Bewohners. Beide Teile der Seitensicherung schließen so eng miteinander ab, dass sie genauso sicher wie ein durchgehendes Seitengitter sind und gehen so über die Norm IEC 60601-2-52 hinaus. Die Bevorratung von Zubehören zum Schließen einer Mittellücke bei der Fixierung mit Bauchgurten ist nicht notwendig.



Für höhere Matratzen ist eine weitere Erhöhung der Sicherungen von plus 6 cm einstellbar.




### Mehr Sicherheit kleine Mittellücke\*<sup>3</sup> < 60 mm

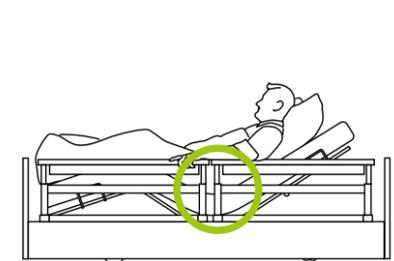


- Bewusste Erfüllung der Norm IEC 60601-2-52
- Sicherheit in Arbeitsposition, d. h. auch mit hochgestellter Rücken- bzw. Beinlehne
- Sicherheit ohne Verwendung eines zusätzlichen Mittellücken-Protectors als Zubehör bei der Fixierung mit Bauchgurten gemäß Empfehlung des BfArM\*<sup>4</sup>

### Pflegeerleichterung 4 geteilte Sicherungen = flexibler Zugriff

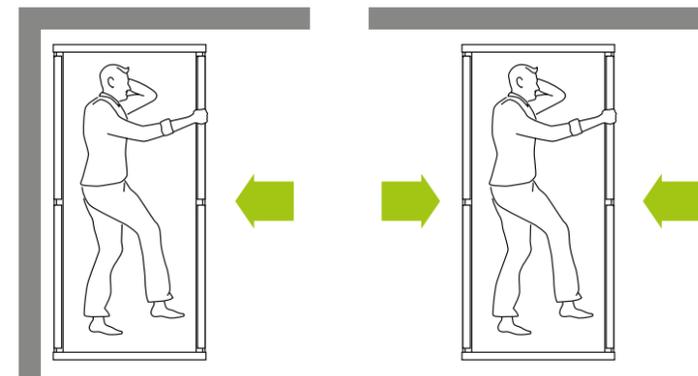

- Flexible Bettverwendung in Nischen bei Standardpflege oder für links/rechts aussteigende Bewohner zur Mobilisation
- Beidseitiger Zugriff bei erhöhtem Pflegebedarf
- Vermeidung von Folgekosten bei Nachrüstung von geteilten Seitensicherungen

### Sicher mobilisieren unabhängig der Körpergröße

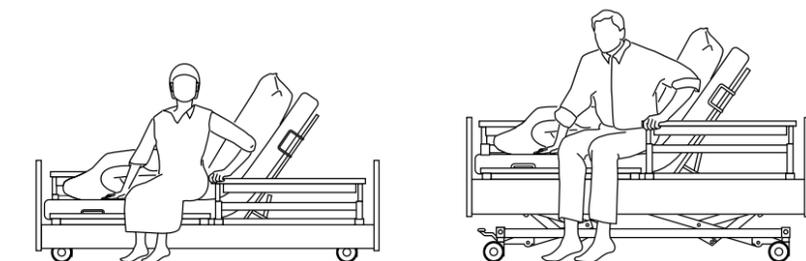

Die geteilte Seitensicherung kann sehr effektiv bei der Mobilisation eingesetzt werden, denn sie ist gut greif- und umfasbar. So dient sie als sichere Aufstehhilfe und fördert nachweislich die Mobilität des Bewohners.

### 2 Automatik Positionen



Im Bett fernsehen, lesen oder frühstücken dank der Komfortsitz-Automatik



Dekubitusprävention & Fersenfreilagerung durch Lagerungsautomatik




## Sicher Pflegen, Mobilisieren & Schlafen

### 3-Stopp-Strategie

- Komfortabler Verstellbereich 27-80 cm
- Erster Zwischenstopp zum Bettausstieg auf Stuhlhöhe bei 41 cm
- Kollisionsschutz bei Einstellung der Komfortsitzeinstellung aus der Niedrigposition und bei Verwendung einer Bettverlängerung

80 cm

Optimale Pflegeposition

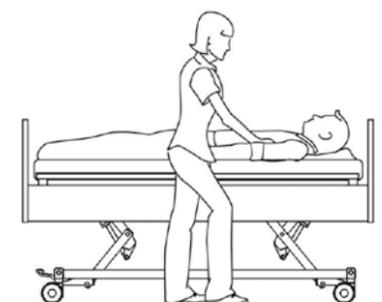

41 cm\*

Sichere Mobilisation auf Stuhlhöhe



27 cm\*

Sturzprävention in der Schlafphase




## Flexibilität & Zeitersparnis

### 3 Bettlängen werkzeuglos einstellbar

- Unsere Pflegebetten verfügen serienmäßig über eine integrierte Bettverlängerung
- Flexibel und werkzeuglos für verschiedene Bettlängen
- Die Vorgaben der Norm IEC 60601-2-52 werden dabei in jeder Konfiguration eingehalten


200 cm

Bettlänge 200 cm:  
Die geteilten Seitensicherungen bieten Schutz ohne große Mittellücke\* und ohne Protektor.

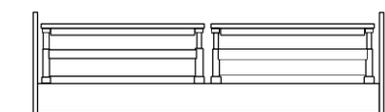


210 cm

Alternative Bettlänge 210 cm:  
Schutz mit fußseitig längeren Seitensicherungen ohne Zubehöre und ohne Lücke > 318 mm\*\*.

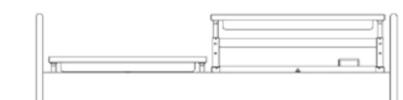

220 cm

Bettverlängerung auf 220 cm:  
ist bei sentida mit geteilten Seitensicherungen temporär einstellbar – vollständiger Schutz wird durch fußseitigen Protektor (Zubehör) gewährleistet.

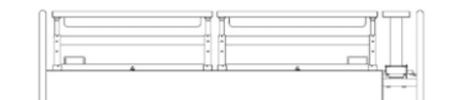


Mehr erfahren:





## Wohnidee Dahlia

sentida 7-i | Design G10 | Dekor Lindberg Eiche

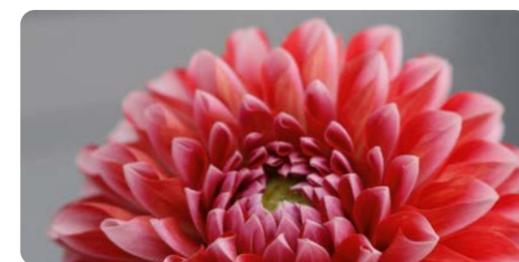

## 2 Modelle zur Wahl

### Das Wohnliche



**Fahrbarkeit**  
In jeder Betthöhe

**Rollen**  
Vier 50 mm Doppelaufrollen  
Vollständig durch wohnliches  
Chassis verkleidet



**Bremsbarkeit**  
Achswise Pedalbremse  
mit 2-Rollen-Zentralfest-  
stellung

**Höhenverstellung**  
27-80 cm

### Das Extramobile



**Fahrbarkeit**  
In jeder Betthöhe

**Rollen**  
100, 125 oder 150 mm Leichtlauf-  
rollen oder 125 mm Doppelauf-  
bzw. Designrollen



**Bremsbarkeit**  
Bremsbügel fußseitig  
mit 4-Rollen-Zentralfest-  
stellung

**Höhenverstellung**  
27-80 cm  
mit 100 mm Leichtlaufrolle  
29,5-82,5 cm  
mit 125 mm Leichtlaufrollen  
28-81 cm  
mit 125 mm Doppelauf- bzw. Designrollen  
32-85 cm  
mit 150 mm Leichtlaufrollen

## CareBoard®

### 2 Positionen zur Wahl



**Wandhalterung**, Kabelanschluss kopfseitig



**Fußteilverhalterung**, Kabelanschluss fußseitig

## 2 Leuchten

### lymera & soluna

Besondere Designelemente der Leuchten sind die wellenförmigen bzw. transparenten Lampenschirme mit dem teilweise transluzenten Charakter. Ausgestattet mit einem schwenkbaren Arm ermöglichen unsere Leuchten die genaue Positionierung des Lichtpunktes in der Nähe des Objekts, welches beleuchtet werden soll.



Komfort-LED-Leseleuchte lymera

### Vorteile der LED

- Lange Lebensdauer
- Geringer Energiebedarf
- Keine Wärmeentwicklung
- Absolut sichere Funktionsweise




Design-LED-Leuchte soluna  
mit gewelltem Lampenschirm



# Farben | Dekore\* | Softcover

## Farben | Dekore\*

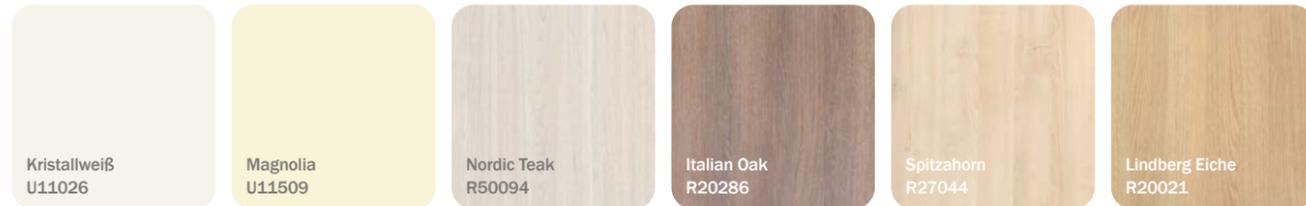

## Kunstleder | Softcover für Kopf-/Fußteil Df\*



## Stoff | Softcover für Kopf-/Fußteil Df\*



## Softcover – Preiswert und flexibel

Alle gezeigten Stoff- und Kunstlederdekore sind auch als Hussen erhältlich, die Sie einfach und werkzeuglos selbst auf den Kopf- und Fußteilen\* Ihrer Pflegebetten anbringen können. Die Softcover sind extrem strapazierfähig, nässe- und schmutzresistent, wasserabweisend und atmungsaktiv.



Kunstleder: Smoke  
Dekor: Rüster Salisbury Natur

# Design | Kopf-/Fußteile

## Kopfteil



Design A  
Kopf-/Fußteil



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design Ts

## Fußteil



Design Ak  
Kopf-/Fußteil



Design Df



Design G



Design K



Design O



Design Ts

## Flaches Fußteil



Design Ak  
abgeklappt



Design Dfx



Design Gx



Design Kx



Design Ox



Design Tsx

# Sicherheit

Das Unternehmen ist zertifiziert nach den Bestimmungen der ISO 9001 für Qualitätsmanagement-Systeme, DIN EN ISO 13485 für die Herstellung von Medizinprodukten sowie ISO 14001 für Umweltmanagement. wissner-bosserhoff lässt zusätzlich regelmäßig seine Fertigungsprozesse und das Management vom TÜV Süd auditieren.



ISO 9001:2015



ISO 13485:2016



ISO 14001:2015



CB-Zertifikat für  
Produktsicherheit,  
TÜV Süd



Gutachten zu  
Seitensicherungen



Wir haben die Treibhausgasemissionen, die durch die Tätigkeiten unseres Unternehmens verursacht werden, erfassen lassen\*\* und durch den Erwerb von Klimaschutzzertifikaten für die Jahre 2022 und 2023 ausgeglichen.

# Nachttische und weiteres Zubehör

finden Sie in Extra-Prospekten oder unter [www.wi-bo.de](http://www.wi-bo.de)




# Ausstattungen und Zubehör

## Ausstattungsoptionen

**Basisversion**  
Waage (inkl. BMI-Check), Bed-Exit, Vorbereitung Pflegedokumentation

- Modul 1** Pflegedokumentation
- Modul 2** Free & Safe
- Modul 3** Feuchtigkeits-Kit
- Modul 4** Mobilisations-Kit


## Maße

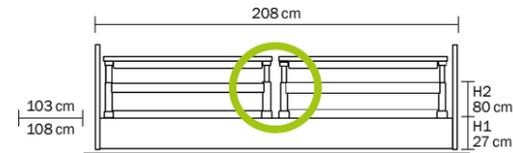

sentida 7-i mit geteilten Seitensicherungen (10er), lückenlos  
Außenmaß: L = 208 cm, B = 103/108 cm  
Matratzenmaß: L = 200 cm, B = 87 cm  
H1 27 cm (Niedrigposition), H2 80 cm (Höchstposition)

**10-0697**  
sentida 7-i |  
Das Intelligente & Wohnliche  
**10-0698**  
sentida 7-i |  
Das Intelligente & Extramobile


## Liegeflächen

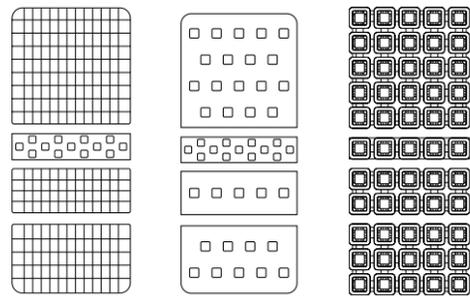

01 Standard | Aero    02 EasyClean    03 Komfort


## Liegeflächen-Modularität

Sie haben 3 verschiedene Liegeflächen zur Auswahl:  
01 Die Drahtgitterliegefläche Aero sorgt für eine gute Durchlüftung.  
02 Die Kunststoffauflagen der EasyClean-Liegefläche sind besonders leicht zu reinigen.  
03 Die Komfort-Liegefläche mit ihren 55 Federelementen fördert nicht nur den Liegekomfort, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Dekubitusprävention.  
Generell sind die Liegeflächenpartitionen leicht zu reinigen und entnehmbar.

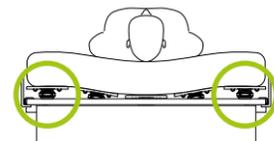


Komfortliegefläche mit 55 Federelementen


## Bettverlängerungen

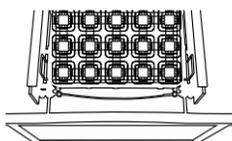

Bettverlängerung mit Expressauslösung (Option)

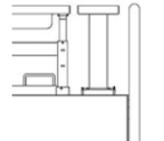


Permanente Bettverlängerung mit Halterung 10er Seitensicherung (Option)

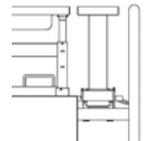

**10-0580**  
Protektor für Bettverlängerung um 20 cm (Option)


## Optionen

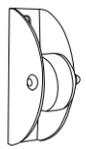


Vertikale Wandabweiserrollen




3D-Wandabweiserrollen horizontal und vertikal wirkend

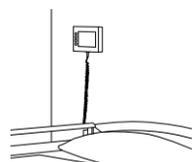


Kabelanschluss kopfseitig mit Halterung zur Wandmontage

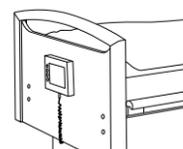

Kabelanschluss fußseitig mit Halterung am Fußteil

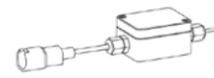


LED-Anschlussbox für soluna und Iymera

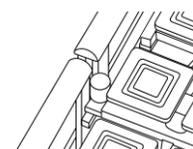


Seitlicher Anschluss für Feuchtesensor-Matte


## Zubehör

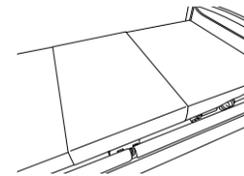


**50-0938**  
Baumwoll-Sensorlaken; ohne Kabel

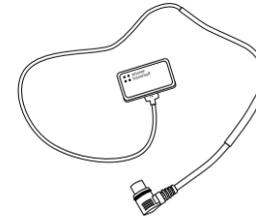

**50-0945**  
Kabel für Baumwoll-Sensorlaken

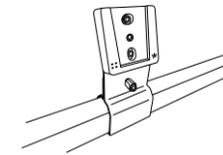

**10-0887**  
CareBoard® Halterung für Design G und Gx

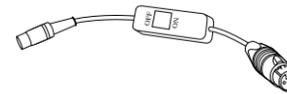


**04-1508**  
Adapterkabel mit Ein-/Ausschalter und passendem Stecker für den Anschluss an die Rufanlage (kundenspezifisch) für Kabel- und Funklösung



**04-1608**  
Adapterkabel ohne Ein-/Ausschalter; mit passendem Stecker für den Anschluss an die Rufanlage (kundenspezifisch) für Kabel- und Funklösung




**50-0681**  
Funkempfänger nur für Funklösung

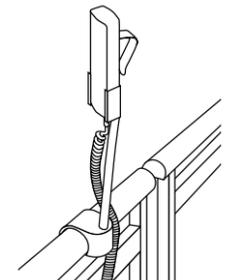

**10-0419 und 10-0790**  
Jederzeit gute Erreichbarkeit für Bewohner und Personal




**50-0165** Urinflaskenkorb  
**50-0164** Urinbeutelhalter (ohne Abb.)  
**10-0424**  
Zubehöraufnahme zur Anbringung an der Seitenwange

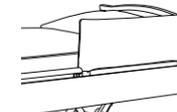


**50-0174**  
Polster für geteilte 10'er Seitensicherungen




**50-0771**  
Sturzmatte mit Antirutschschutz B 90 x L 200 cm, Höhe ca. 4,5 cm

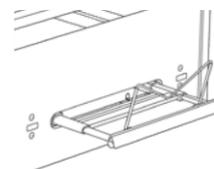


**10-0617**  
Integrierte Design-Bettzeugablage Kompatibel mit allen Betten (außer Design A-kk und CareBoard® fußseitig)

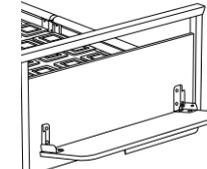

**10-0719**  
Bettzeugablage

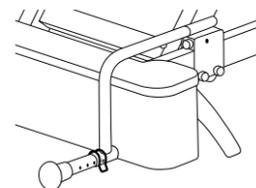

Kopfseitiger Wandabstandshalter, teleskopierbar  
**10-0801** kurz, 1 x 20 mm  
**10-0802** mittel, 4 x 20 mm (Abb.)  
**10-0803** lang, 8 x 20 mm

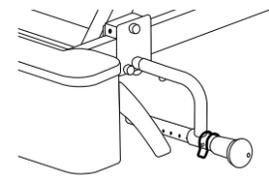

Seitlicher Wandabstandshalter, teleskopierbar  
**10-0806** lang, 8 x 20 mm



# ■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

## wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Deutschland  
Tel.: +49 2377 784-0 | Fax -163 | info@wi-bo.de | wi-bo.de

# bigla care

## Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Schweiz  
Tel.: +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

---

## Members of LINET Group

