


pura
Der Multifunktionsstuhl



Vielseitige Lösungen für die ambulante Pflege

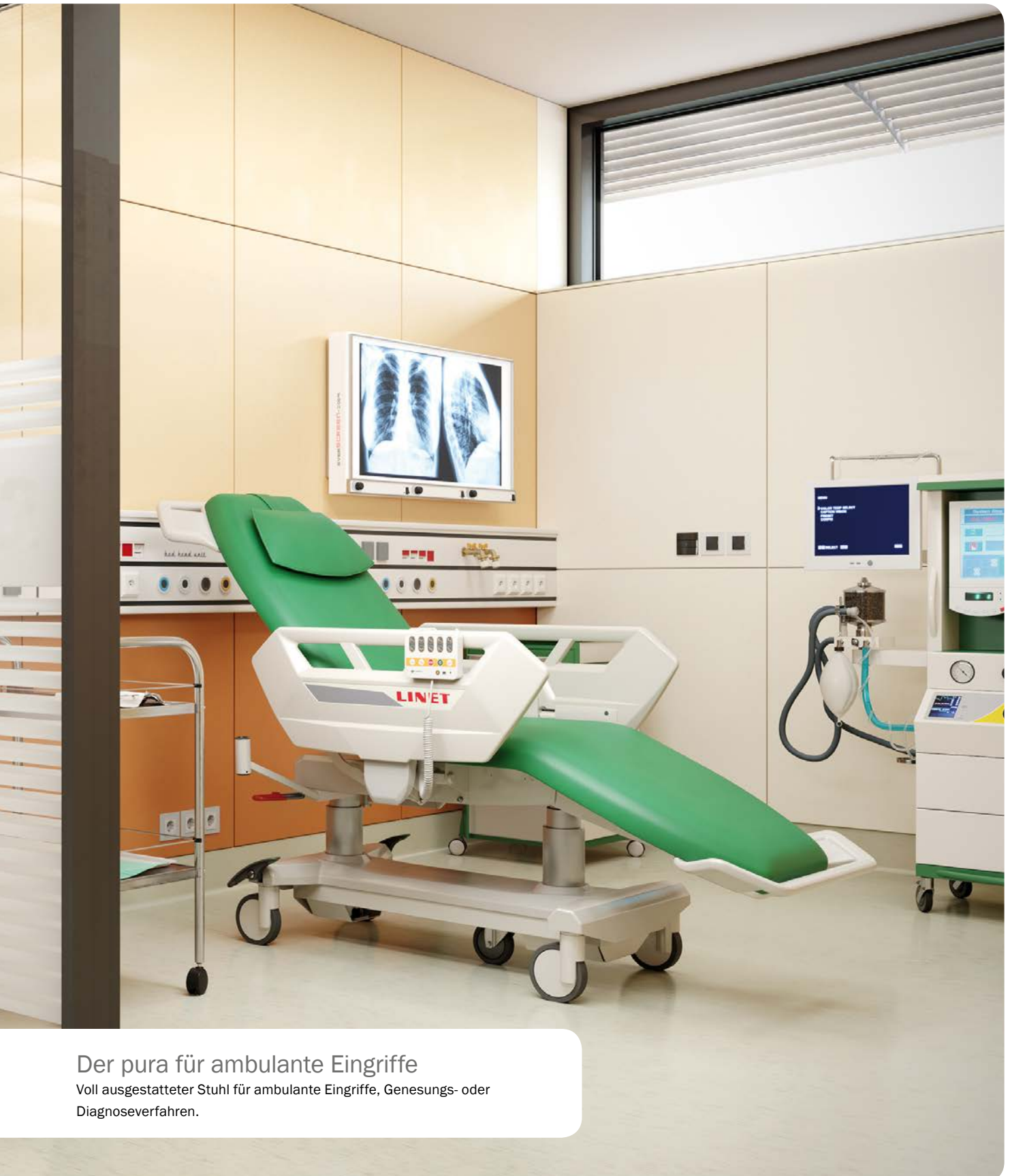

Der pura für ambulante Eingriffe

Voll ausgestatteter Stuhl für ambulante Eingriffe, Genesungs- oder Diagnoseverfahren.



Der pura für Behandlungen

Komfortabel ausgestattet für Dialyse, onkologische Behandlungen oder Blutspenden.

360° Pflege mit pura

Einfacher Transport

Der Transport des Patienten ist sicher und nur mit minimaler körperlicher Belastung verbunden.



Transport

Angenehmer Aufenthalt

Der Komfort des Patienten wird bei längeren Aufenthalten durch individuell einstellbare Bauteile und eine weiche Polsterung gewährleistet.



Komfort

pu

Sicherheit

Sicherheit

Das einzigartige Design der Seitensicherungen sorgt für den Schutz des Patienten, während der Soft-Drop-Mechanismus ein sanftes und geräuscharmes Absenken der Seitensicherungen und einen einfachen Zugang zum Patienten ermöglicht.



Genesung

Funktionalität

Die Niedrigstposition ist sicher und bietet eine optimale Höhe zum Ein- und Aussteigen.



Sicherheit

Das neue Seitensicherungskonzept des pura für ambulante Eingriffe erhöht das Sicherheitsniveau in der professionellen ambulanten Versorgung und bietet dem Patienten mehr Schutz und Komfort. Die verfügbaren Funktionen unterstützen die Ergonomie und erleichtern die Arbeit der Pflegekräfte erheblich.

Seitensicherungen mit Soft-Drop-Technologie

Die Seitensicherungen sind mit der Soft-Drop-Technologie ausgestattet. Das sanfte und leise Absenken der Seitensicherungen ist nicht nur für das Personal angenehm, sondern reduziert auch den Stress für den Patienten während des Aufenthalts auf dem Stuhl.





Trendelenburglage

Die sogenannte Trendelenburglage bringt den Patienten in eine Anti-Schock Position in Kopftieflage und ist eine der voreingestellten Funktionen des pura.



Mechanische CPR

Eine schnelle Absenkung der Rückenlehne erlaubt es dem Personal, in kurzer Zeit optimale Bedingungen für eine CPR herzustellen. Die Liegefläche wird in eine flache Position gebracht und bietet so eine stabile Unterlage für die Herzmassage.



Ergonomische Armlehnen

Der pura für Behandlungen ist mit komfortablen Armlehnen ausgestattet, die den Langzeitaufenthalt bei Dialysen oder onkologischen Behandlungen angenehmer gestalten sollen. Sie können individuell in alle Richtungen verstellt werden. Um Scherkräfte oder eine erneute Positionierung des Armes zu vermeiden, fährt die Armlehne bei Verstellung der Rückenlehne immer mit und bleibt in der eingestellten Position. Für einen barrierefreien Ein- und Ausstieg können die Armlehnen einfach nach oben geklappt werden.

Verschiedene Positionierungsmöglichkeiten

Die schnelle und einfache elektrische Steuerung passt die Höhe des Stuhls an, um eine ergonomische Arbeit mit dem Patienten zu ermöglichen.

Durch die unterschiedlichen Positionierungsmöglichkeiten des Rücken- und Beinteils kann der pura vielseitig eingesetzt werden, von therapeutischen Eingriffen in der horizontalen Position bis hin zur individuellen und einfachen Einstellung bei längeren Aufenthalten im Stuhl für Behandlungsverfahren.



Fowler-Position

Am pura kann über die Autokontour-Taste spielend leicht die Fowler-Position eingestellt werden. In dieser halb liegenden Position können Schmerzen gelindert sowie die Atmung unterstützt werden.



Flexible Bedieneinheit

Die benutzerfreundliche und ergonomische Bedieneinheit verfügt über mehrere voreingestellte Positionen, welche die Arbeit des Pflegepersonals erleichtern. Mit nur einem Tastendruck kann die Trendelenburglage, die Untersuchungs- sowie die Einstiegsposition eingestellt werden. Des Weiteren verfügt sie auch über eine Sicherheitsverriegelung der Funktionen, eine GO-Taste und andere intuitive Funktionen für die einfache und schnelle Einstellung des Stuhls.

- Elektrische Verstellung von Rücken- und Beinlehne, der Liegeflächenhöhe und der Fußstütze (Option)
- Autokonturfunktion zur gleichzeitigen Verstellung der Rücken- und Beinlehne
- Einstellung der Trendelenburglage, der Untersuchungsposition sowie der Einstiegsposition mit nur einem Tastendruck
- Sicherheits STOPP/ GO-Taste
- Funktionsspernung

Einfacher Transport

Die Fahr- und Wendigkeitseigenschaften ermöglichen einen schnellen und sicheren Patiententransport bei minimaler körperlicher Belastung.


Einfacher und sicherer Transport

Das robuste Untergestell, ausgestattet mit 150 mm Laufrollen und einer Zentralbremse, ist die beste Wahl für den Transport von Patienten im pura. Durch Details wie dem Transportgriff oder dem fußseitigen Wandabweisbügel werden hervorragende Voraussetzungen für das Fahren in Ambulanzen und Krankenhäusern geschaffen.



Transportgriffe

Das Fußteil kann mit einem robusten Griff ausgestattet werden, der eine ergonomische Handhabung des Stuhls, insbesondere beim Transport, ermöglicht. Der Transportgriff am Kopfteil ist Teil der Standardausstattung.

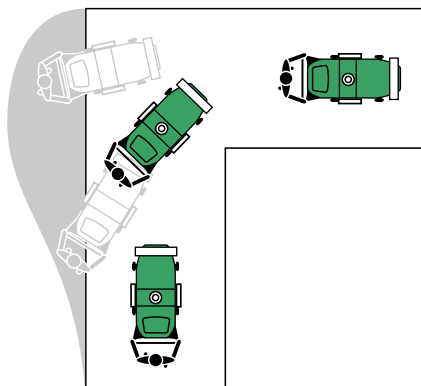

5te Rolle

Eine 5te Rolle am Untergestell ist optional erhältlich. Sie übernimmt die Funktion der richtungsweisenden Rolle und erleichtert das Handling beim Drehen auf der Stelle sowie das Manövrieren um Ecken oder in Aufzüge. In langen Gängen unterstützt sie bei der stabilen Geradeausfahrt. Durch die 5. Rolle ist das Schieben durch nur eine Person möglich.

Sichere und komfortable Pflege

Zur maximalen Entlastung von Pflegekräften und Personal bietet der pura ein innovatives Infektionsschutzkonzept und eine ausgefeilte Reihe praktischer Details.



Infektionskontrolle

Die einzigartige und patentierte Hubsäulenkonstruktion schafft neben der Tatsache, dass nur großflächige Bauteile ohne unnötige Spalten verbaut sind, die Grundlage für eine einwandfreie Hygiene.

Sauerstoffflaschenhalter

Horizontaler Sauerstoffflaschenhalter an der Rückenlehne für Flaschen bis 5l.



Kunststoffbehälter

Als definierter Ort für persönliche Gegenstände.



Urinbeutelhalter

Dient zur einfachen Unterbringung von Urinbeuteln bis maximal 2l.



Das Design des Stuhls wurde in erster Linie so angepasst, dass der Patient einen angenehmen Aufenthalt hat. Eine weiche Polsterung und die hochwertigen verwendeten Materialien bilden hierfür die Grundvoraussetzung.



Ein- und Aussteigen

Die niedrige, sichere Position ist für den Patienten bequem und bietet sowohl beim Aufenthalt als auch beim Ein- und Ausstieg ausreichend Komfort.

Abschließbare Box

Wichtige, kleine persönliche Gegenstände wie Schlüssel, Mobiltelefon oder Brieftasche können in dieser abschließbaren Box sicher verwahrt werden.



Papierrollenhalter

Der Papierrollenhalter am Kopfende kann optional gewählt werden und bringt ein weiteres Plus in Richtung Hygiene.



Abnehmbarer Tisch

Ein praktischer Tisch mit separatem Halter für den flexiblen Einsatz je nach Wunsch des Patienten.



Technische Parameter

Der pura für Behandlungen

- 1** Einstellbare Armlehnen
- 2** Elektrisch verstellbare Fußstütze
- 3** Halter für Infusionsständer
- 4** Transportgriff
- 5** CPR Auslösung
- 6** 100 mm Doppellaufrollen mit Einzelfeststellung



Länge des Stuhls	Transportgriff	220 cm 228 cm
Breite des Stuhls	Mit herabgelassenen Seitensicherungen mit Armlehnen	78 cm 89 cm
Höhenverstellung (100 mm Rollen)	Niedrigst- bis Höchstposition	55,5 - 93,5 cm
Höhenverstellung (150 mm Rollen)		59,0 - 97,0 cm
Rollen	Rollendurchmesser Bremse	100 mm Einzelfeststellung
		150 mm Zentralfeststellung
Einstellwinkel	Rückenlehne	70°
	Sitzteil	- 12°
	Beinlehne	33°
	Armlehne - vertikal	+ 42° - 8,5°
	Armlehne - horizontal	360°
Trendelenburglage (TR)	12°	
Sichere Arbeitslast	205 kg	
Maximales Patientengewicht	190 kg	
Gewicht	ca. 110 kg (abhängig von der Ausstattung)	

Der pura für ambulante Eingriffe

- 1 Seitensicherungen
- 2 150 mm Rollen mit Zentralfeststellung
- 3 Halter für Infusionsständer
- 4 Kopfseitiger Transportgriff
- 5 Fußseitiger Transportgriff
- 6 CPR Auslösung



Farbvariationen

Standardfarben



Blau



Gelb



Orange



Grün



Lavendelfarben



■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Phone: +49 2377 784-0 | Fax: -163 | info@wi-bo.de | www.wi-bo.de

bigla
care

Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Switzerland

T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch