

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

Fonctionnel. Intelligent. Dignité.

sentida

Lits de soins bas universels





La sécurité et le bien-être à la perfection

sentida – lits de soins bas universels

Avec les lits de soins bas de la gamme sentida, wissner-bosserhoff a réussi à répondre de manière cohérente et surtout sans compromis aux exigences des soins infirmiers contemporains : le respect des normes de sécurité associé à un design convivial. Des solutions innovantes telles que la stratégie unique des 3 arrêts automatiques de la hauteur variable et le concept breveté de barrières SafeFree® permettent de réduire les risques de chutes et leurs conséquences.

Les chutes constituent l'un des plus grands dangers pour la santé physique et le bien-être psychologique des personnes âgées. La prévention systématique des chutes joue donc un rôle décisif dans les soins aux personnes âgées et constitue une caractéristique de qualité importante pour les établissements de soins.

5

millions de chutes
chez les personnes
âgées chaque année :

Elles sont près d'un tiers à partir
de 65 ans et de la moitié à partir
de 80 ans à chuter au moins
une fois par an.

Rien qu'en Allemagne,
on compte près de 5 millions
de chutes chez les personnes
âgées chaque année.

(Source : « Gesundheit und Krankheit im Alter »
(Santé et maladie dans la vieillesse).
Directeur de la publication : Karin Böhm, Statistisches Bundesamt/
Clemens Tesch-Römer, Deutsches Zentrum für Altersfragen/
Thomas Ziese, Robert Koch-Institut, Berlin 2009)



Prévention avec
les lits de soins
bas sentida

utilisés dans les établissements
exigeants en matière de soins :
maisons de retraites et
résidences médicalisées, services
dédiés aux résidents atteints de
démence, services de rééducation
dans le domaine des soins de
suite tels que l'orthopédie,
l'hospitalisation en dialyse
ou la gériatrie.



Ambiance Feathers

sentida | Modèle O10 | Décor Noyer Okapi

La nature a servi de modèle pour le choix des matériaux et des couleurs. Une association harmonieuse, comme les plumes d'un oiseau, qui permet de créer une pièce agréable dont l'atmosphère transmet au résident un sentiment de sécurité et de protection. Près de la fenêtre, résonne le chant matinal des oiseaux. Ce concept est une simple suggestion, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés.



Gamme sentida

Le premier modèle de la gamme des lits bas



Le mobile



Le lit universel au couchage bas



Le chaleureux



L'ultra-mobile



Désormais disponible en version démontable, voir p. 30

Modèle	sentida 1	sentida 3	sentida 4	sentida 5	sentida 6
Manœuvrabilité	En position basse	Quelle que soit la hauteur du plan de couchage	Quelle que soit la hauteur du plan de couchage	Quelle que soit la hauteur du plan de couchage	Quelle que soit la hauteur du plan de couchage
Roues	Au pied, sans roues À la tête, deux roues fixes de 100 mm	Au pied, quatre roues double galet, diam 50 ou 75 mm À la tête, deux roues fixes de 100 ou 160 mm	Roues double galet, diam 50 ou 75 mm	Roues double galet, diam 50 mm Châssis chaleureux grâce à l'habillage du châssis bas	Roues diam 100, 125 ou 150 mm, ou roues double galet, diam 125 mm
Système de freinage	Frein électrique commandé par un boîtier de commande	Frein électrique commandé par un boîtier de commande + frein centralisé en pied de lit	Frein électrique commandé par un boîtier de commande + frein centralisé en tête et en pied de lit	Frein centralisé par pédales bilatérales en tête et en pied de lit	Frein centralisé en pied de lit
Charge de fonctionnement maximale en toute sécurité	225 kg	225 kg	225 kg	270 kg	270 kg
Réglage de la hauteur	25 - 80 cm	25 - 80 cm	25 - 80 cm	27-80 cm	27 - 80 cm avec 100 mm roues 29,5 - 82,5 cm avec 125 mm roues 28 - 81 cm avec 125 mm roues double galet 32 - 85 cm avec 150 mm roues
Sommiers	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm	87/100 x 200/210/220 cm	87 x 200/210/220 cm 100 x 200/210/220 cm (sentida 5-xl) NOUVEAU : 120 x 200 cm (sentida 5-xxl, voir p. 18/19)	87/100 x 200/210/220 cm (sentida 6 & 6-d*) 100 x 200/210/220 cm (sentida 6-xl) 79 cm x 200 cm (sentida 6-s) 79 cm x 190 cm (sentida 6-xs)



Aperçu des avantages



Protection et mobilité sans MRL* SafeFree® le concept de barrières latérales breveté	12 - 13
Demi-barrières personnalisables selon les besoins SafeFree® Flex	14 - 15
Soigner, mobiliser et dormir en toute sécurité Système à trois crans	16
Flexibilité et gain de temps 3 longueurs de lit réglables sans outil	17
Prévention efficace des escarres Ergonomie et modularité du sommier	20
Assistant de mobilisation manuelle MobiStick 2	21
NOUVEAU: Repensée. Ergonomique. Intuitive. SafeControl® Nouvelle télécommande de la gamme Sentida	22
Améliorer et préserver la mobilité SafeLift Une utilisation du lit révolutionnaire pour le résident	23
La sécurité de jour comme de nuit SafeSense® les capteurs intelligents de sortie du lit	24
NOUVEAU: SafeSense® 3 De la technologie des capteurs de surveillance à la digitalisation du lit	25
Économie d'énergie et fiabilité Grâce à une motorisation novatrice	28
Lampes soluna & lymera	29
Version démontable sentida 6-d	30
Nous allons plus loin memoriana Le concept spatial destiné aux personnes désorientées	31
Autre sélection Design coloris et décors Équipements et accessoires	32




Ambiance Urban

sentida | Modèle HD-3 | Décor Merisier havane | Tissu Pierre | Agrafage des boutons

L'actualité souligne une véritable tendance à un style de vie plus urbain au sein d'une ville synonyme de diversité et de liberté et dans laquelle chacun se reconnaît. Métropole ou mégapole, elle appartient à tout le monde et chacun s'y sent à la fois en sécurité et ouvert à l'Autre.

Ce concept est une simple suggestion, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés.

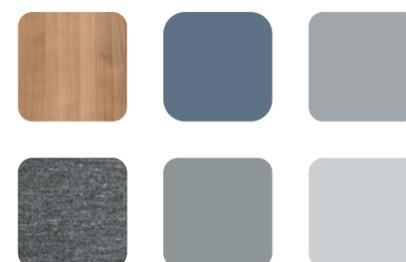

Protection et mobilité sans MRL*

SafeFree®, le concept de barrières latérales breveté

Le système de demi-barrières latérales SafeFree® est breveté, certifié sur une base volontaire et la technologie a été testée dans la pratique à plus de 1.000 000 reprises. Il peut être abaissé facilement, rapidement et de façon peu encombrante en 2 secondes seulement et peut être réglé individuellement selon 4 hauteurs en fonction de la situation de soin et de la taille du résident.

1

Aucune protection requise



Réglées en position basse, les demi-barrières offrent un aspect visuel chaleureux et très esthétique. Elles permettent d'accéder sans obstacle au résident pour effectuer ses soins quotidiens, changer ses pansements ou faire le lit. La sortie du lit est aisée pour le résident car dans cette position la demi-barrière ne produit pas de compression au niveau des cuisses.

2

Protection légère
(sans contention)



Pour assurer une sécurité satisfaisante pendant la nuit, il suffit souvent de combiner le couchage en position basse avec l'utilisation de la barrière latérale de sécurité côté tête, relevée au niveau du matelas. Cette protection évite l'usage de barrières superflues, réduit le risque de chute et offre une aide à l'orientation pour le résident alité.

3

Protection 3/4
(sans contention)



La protection 3/4 est indiquée pour laisser un espace en pied de lit, permettant à l'occupant d'en sortir, et pour réduire la contention en satisfaisant aux exigences de sécurité. Associée à un ajustement de la hauteur du plan de couchage, cette configuration est une aide à la mobilisation du résident, quelle que soit sa taille.

4

Protection intégrale (MRL*)
pour les matelas de 18 cm




La position la plus haute des barrières protège intégralement le résident sur toute la longueur du lit. Les 4 demi-barrières offrent le même niveau de sécurité que des barrières pleine longueur et ne nécessitent aucun accessoire de rehausse supplémentaire.



Pour les matelas plus épais, il est possible d'installer un dispositif de rehausse supplémentaire des barrières de 6 cm.




Sécurité renforcée grâce à un espace** inférieur à 60 mm

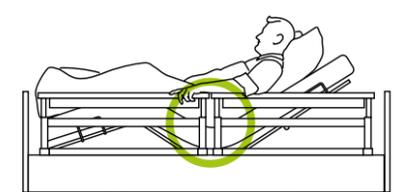

- Volonté de satisfaire à la norme CEI 60601-2-52
- Sécurité pour le résident quelle que soit la position du plan de couchage (parties buste et jambes relevées)
- Protection complète sans nécessité d'ajouter un accessoire supplémentaire entre les barrières ou au bout du lit, conformément à la recommandation du BfArM***

Soulagement des soins
4 demi-barrières = accès flexible

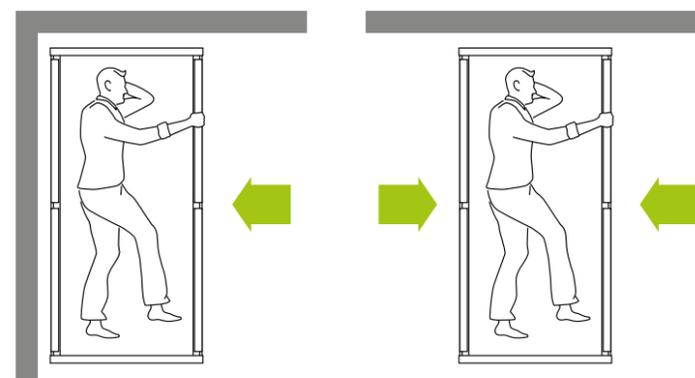

- Possibilité d'utilisation du lit contre le mur pour les soins standards (ill. 1)
- Flexibilité d'accès de chaque côté du lit pour des soins plus spécifiques (ill. 2)
- Flexibilité lors de la mobilisation permettant au résident de se lever à droite ou à gauche du lit
- Minimisation des risques grâce à la modularité des demi-barrières

Mobiliser en toute sécurité
indépendamment de la taille du corps



La demi-barrière latérale peut être utilisée de manière très efficace dans le cadre de la mobilisation car elle est facile à saisir et à enserrer. Elle représente ainsi un dispositif d'aide au redressement sécurisé et favorise la mobilité du résident.

2 positions pré-programmées



Regarder la télévision, lire ou déjeuner au lit, grâce à la position assise de confort automatique



Prévention des escarres et soulagement des talons grâce au système de positionnement automatique

* mesures de restriction de liberté (MRL) ** Espace médian = écart entre les demi-barrières latérales de sécurité

*** Informations de l'Institut fédéral des produits pharmaceutiques et médicaux (BfArM) pour le secteur professionnel du 8 juillet 2004 (référence n° 913/0704) équivalent de l'Afssaps en France

SafeFree® Flex

Des demi-barrières parfaitement adaptées à vos besoins

Afin de compléter les éléments latéraux fixes, le système SafeFree® Flex, innovant et personnalisable, offre une liberté et une sécurité optimales, tout en conservant le design harmonieux qui distingue tous les lits de soins de l'entreprise wissner-bosserhoff.

0

Aucune protection requise



Lit confort, sans demi-barrières

1|2

Protection légère (aucune MRL*)



Aide à la mobilisation uniquement via les éléments côté tête

3

Protection 3/4 (aucune MRL*)



Aide à l'orientation avec sortie de lit d'un côté uniquement

4

Protection totale (MRL*) pour les matelas jusqu'à 18 cm



4 demi-barrières entièrement réglables

Safe

Une protection intégrale



Fixation sécurisée des éléments.

Prévient tout risque de retrait involontaire de chaque demi-barrière.

Une sécurité sans faille



Comblement de l'espace entre la paroi latérale et le sommier. Permet d'éviter tout accident dû à un coincement.

Une mobilisation maximale



Longueur optimale et hauteur individuellement réglable des demi-barrières côté tête. Protection parfaite au niveau des hanches pendant le sommeil et mobilisation confortable et ergonomique du résident.



Free

MRL* réduite



Absence volontaire de demi-barrières.

Sécurité de l'investissement pour l'exploitant. Sécurité juridique et MRL* pour le personnel soignant.

Flex

Davantage de rentabilité


Remplacement sans outils des différents éléments.

Compte tenu de la flexibilité du système, vous n'achetez que ce dont vous avez besoin pour vos résidents.

Aucune intervention technique nécessaire.

Adaptation rapide du lit aux changements de situation du résident, grâce aux différents éléments disponibles : sécuri-barre avec (2) ou sans main courante (1), ou demi-barrière télescopique (3).

Profitez d'un design agréable doté de longs pans latéraux esthétiques, préservant la mobilité et la sécurité du résident quelle que soit sa situation.

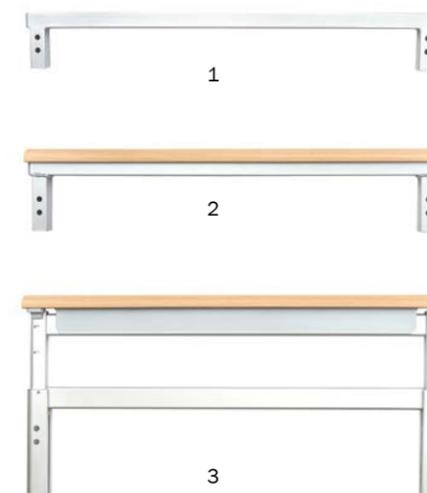

En savoir plus:



Vidéo



Soigner, mobiliser et dormir en toute sécurité

Système à trois crans

- Amplitude de réglage du plan de couchage de 27 à 80 cm
- Arrêt automatique de la hauteur variable à 41 cm, pour permettre au résident de sortir du lit dans une position ergonomique
- Prévention du risque de collision lors du réglage de la position fauteuil à partir de la position basse et lors de l'utilisation de la rallonge de sommier


Flexibilité et gain de temps

3 longueurs de lit réglables sans outil

- Tous les lits de soins wissner-bosserhoff disposent d'une rallonge de sommier intégrée.
- Grâce à la rallonge de sommier Express (ill. ci-dessous/en option), les lits de soin sentida, dotés de demi-barrières latérales de sécurité, s'adaptent très facilement aux différentes longueurs de lit.
- Les prescriptions de la nouvelle norme CEI 60601-2-52 sont ainsi respectées quelle que soit la configuration.

80 cm

Pour le confort des soins sans exercer de pression sur le dos

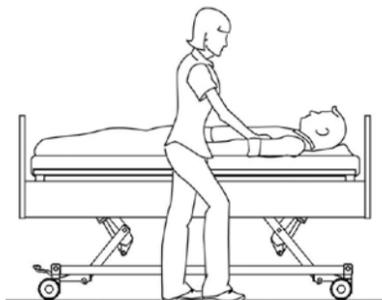

41 cm*

Pour sortir du lit à une hauteur de siège respectueuse des principes de l'ergonomie




27 cm*

Pour la prévention des chutes et un couchage en toute sécurité la nuit




200 cm

Longueur du lit 200 cm : les demi-barrières latérales offrent une protection sans espaces supérieurs à 318 mm* et sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une protection.

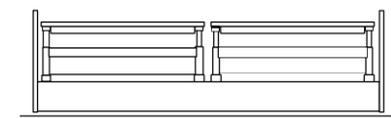


210 cm

Longueur du lit intermédiaire 210 cm : protection avec des barrières latérales plus longues au niveau des pieds, sans espaces supérieurs à 318 mm**

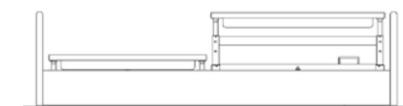

220 cm

Rallonge de lit sur 220 cm : réglable temporairement sur les lits sentida équipés de demi-barrières latérales - Protection intégrale garantie au moyen d'une poignée de mobilisation côté pied (disponible en accessoire)

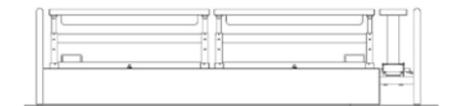



NOUVEAU
 sentida 5-xxl avec
 plan de couchage
 120 x 200 cm

Ambiance Forest hike

sentida 5-xxl | Modèle G10 | Décor Chêne italien

Pour beaucoup de personnes, la randonnée est un bon moyen de ralentir le cours du temps dans un monde allant toujours plus vite. Tel le bruit relaxant d'un petit ruisseau coulant au pied d'un imposant chêne, cette conjonction de couleurs boisées et colorées confèrera détente et relaxation au résident. Ce concept est une simple suggestion, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés.



Prévention efficace des escarres

Ergonomie et modularité du sommier

La double translation est un concept novateur de réduction du risque d'escarre. Grâce à cette innovation, le dossier mais aussi le repose-jambes sont éloignés de l'assise, ce qui permet d'augmenter la surface sur laquelle le résident repose. Les résultats des mesures de pression montrent clairement que la pression avec la double translation est nettement inférieure à celle d'un plan de couchage standard.

environ **37.5 %**
de tous les résidents des
maisons de retraite ou de soins
sont soumis à un
risque accru de décubitus


Source : Enquête propre, wissner-bosserhoff 2020

environ **2.7 m.**
de personnes
en Allemagne souffrent
de plaies chroniques telles
que des **escarres**


Source: Study BVMed 2012

Nos solutions

Sommier wibo avec translation et soulagement des compressions visible

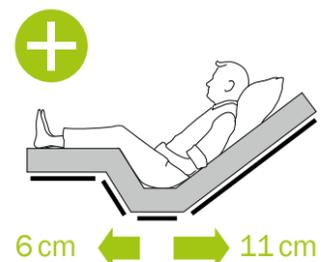


Double translation = prévention des escarres

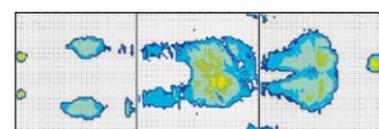


Sommier BiNetic, avec double translation

Sommier standard, pas de translation

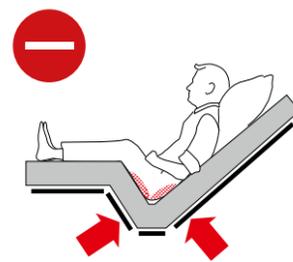


Simple retrait = risque d'escarres

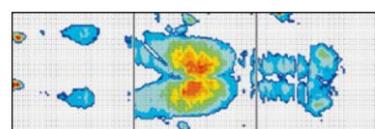

Avec sommier standard


Modularité du sommier

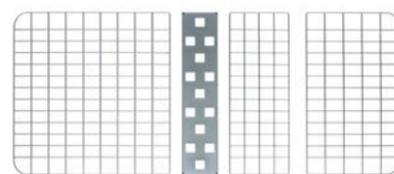

Le sommier Aero à grille (Standard)
→ bonne ventilation



Le sommier Easyclean
→ facile à nettoyer

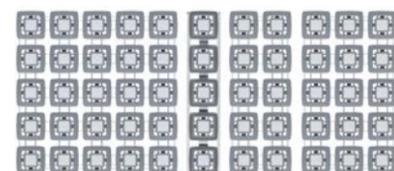

Le sommier confort et ses 55 suspensions mobiles → confort de couchage élevé et répartition de la pression

Double translation =
17cm
plus de place dans le lit !

Poignée de mobilisation

MobiStick 2

La poignée MobiStick 2 est une aide intuitive pour le résident. En raison de sa forme ergonomique elle est facile à utiliser par le plus grand nombre. Elle favorise la mobilisation active et le résident peut bien ainsi rester autonome et se mobiliser seul.



Sans outil
et flexible

La MobiStick 2 peut être fixée des deux côtés du lit sans outils, convient à toutes les tailles de résidents et peut être installée ultérieurement sur les lits wissner-bosserhoff à partir de 2004.



Avec sa forme ergonomique, la poignée MobiStick 2 est facile à utiliser par le plus grand nombre. Son pommeau est orientable et son mécanisme de verrouillage simple.



Lorsqu'elle n'est pas utilisée, elle se range le long du plan de couchage et reste rapidement accessible en cas de besoin.

En savoir plus:





Avantages pour la nuit

- La télécommande SafeControl s'active dès lors qu'elle est déplacée et rétroéclaire toutes les touches sélectionnables.
- Pas besoin d'allumer la lumière dans la chambre la nuit.
- Respect du repos nocturne du résident.



Fonctions des résidents

- Réglage du dossier
- Autocontour
- Réglage de la hauteur

Boutons d'activité

- Haut / Bas
- Indicateur de statut LED

Fonctions de soins

- Siège confort automatique
- Positionnement automatique

NOU-VEAUTÉ !



Repensée. Ergonomique. Intuitive.

SafeControl® | Nouvelle télécommande de la gamme sentida



Vidéo

En plus de sa clarté et de son design ergonomique, la télécommande SafeControl® se distingue par son fonctionnement intuitif. Grâce à des capteurs de mouvement et à un rétro-éclairage contrôlé, toutes les fonctions sélectionnables sont indiquées à l'utilisateur. Cela garantit une utilisation facile, notamment la nuit.



3 niveaux de sécurité

La télécommande peut être configurée de plusieurs façons en fonction des besoins :

- Mode soin** : toutes les touches de sélection sont débloquées
- Mode verrouillage** : toutes les fonctions de la télécommande sont verrouillées.
- Mode résident** : les touches de sélection gris claires sont à la disposition du résident

Grâce à cette fonction de verrouillage intégrée, aucune clé magnétique n'est nécessaire additionnelle n'est nécessaire.

Confort & Sécurité

- Épurée et ergonomique
- Système de présélection qui évite les erreurs
- Fonctionnement intuitif
- Capteurs de mouvement
- Rétroéclairage
- Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
- Utilisation polyvalente grâce à son long câble

Améliorer et préserver la mobilité

SafeLift | Une utilisation du lit révolutionnaire pour le résident



Vidéo

L'utilisation du SafeLift est très simple : elle permet au résident de régler son lit de manière autonome et de le positionner de façon confortable pour lui. Grâce à sa forme arrondie, le résident peut également prendre appui sur le SafeLift lorsqu'il se redresse, ce qui favorise son automobilisation, réduit les appels au personnel pour régler la position du lit et soulage le personnel soignant.



- Touches de réglage de la hauteur variable du lit et du relève-buste
- Touches de grande taille
- S'adapte sur la main courante des demi-barrières
- Touche GO / Touche d'activation
- Pivote à 360°
- Design ergonomique
- Grande stabilité



La sécurité de jour comme de nuit

SafeSense® les capteurs intelligents de sortie du lit

wissner-bosserhoff recherche toujours les solutions les plus sécuritaires pour vos résidents, tout en essayant de réduire au maximum les mesures de contention. Le SafeSense® est le dispositif innovant, adaptable sur tous les lits de soins WIBO, qui vous permet de prodiguer des soins de meilleure qualité tout en préservant la liberté du résident. Il est équipé d'une veilleuse de nuit automatique qui s'allume lors de la sortie du lit et s'éteint au retour du résident. SafeSense® est compatible avec les dispositifs d'appel malade disponibles sur le marché et est proposé en accessoire sur tous les lits de la gamme wissner-bosserhoff. Un kit d'adaptation est proposé pour tous nos lits de soins livrés depuis 2002.



Veilleuse de nuit automatique

- La veilleuse de nuit s'allume automatiquement lorsque le résident sort du lit
- La veilleuse de nuit s'éteint dès que le résident a regagné son lit

Gestion personnalisée

- L'alarme de sortie de lit peut se régler de 0 à 30 minutes
- Elle s'adapte aux résidents et à leur autonomie

Adaptable sur tous nos lits*

- Disponible en accessoire pour les lits de soins WIBO
- Kit d'adaptation pour tous les lits de soins WIBO livrés et installés depuis 2002
- Disponible avec une connexion par câble ou en Wi-Fi



Video

Plus de sécurité, réduction de la contention

- Temps de réaction rapide en cas de chute
- Haut niveau de sécurité pendant la nuit et le week-end
- Moins de visites de contrôle nécessaires
- Idéal en complément des performances des lits de soins sentida et des demi-barrières SafeFree®

SafeSense® 3

De la technologie des capteurs de surveillance à la digitalisation du lit



Après avoir acquis plus de 6 ans d'expérience avec les capteurs de sortie de lit, il est maintenant temps de proposer un véritable assistant digital. Depuis 2014, wissner-bosserhoff a engrangé beaucoup d'expérience dans le domaine des produits connectés, notamment grâce à son système de détection de sortie de lit et à son lit intelligent sentida 7-i. SafeSense s'est ainsi étoffé de nouvelles fonctionnalités, faisant de lui une plate-forme de numérisation durable grâce à son architecture ouverte. Il pourra ainsi être couplé avec d'autres dispositifs visant à faciliter le travail des aidants.



Des résidents satisfaits grâce à des soins de meilleure qualité

- La surveillance des mouvements 24h/24 fournit des informations précieuses sur l'absence de mouvements, l'agitation nocturne et le manque de sommeil
- Accompagnement dans la prévention des risques d'escarres et de chutes
- Préservation de l'indépendance et mobilité grâce à la surveillance de sortie de lit
- Adaptation du niveau de sécurité à l'autonomie de chaque résident



Video

Le lit de soins intelligent

- Système d'assistance pour une surveillance continue et en temps réel des résidents
- Acquisition et visualisation de données numériques
- Différenciation des alarmes pour une prise en charge plus rapide
- Présence au lit : Résident au lit OUI ou NON

Connecté intelligemment - l'assistance numérique en temps réel


- Aide à la prévention des escarres grâce à la surveillance des mouvements
- Aide à la prévention des chutes grâce à la surveillance de sortie de lit
- Capteurs connectés à une plate-forme numérique grâce à son architecture système ouverte
- Surveillance des soins grâce à la connectivité et aux appareils mobiles



Ambiance Lilac

sentida | Modèle G10 | Décor Omre Salisbury Nature

Intemporels et classiques, les matériaux et couleurs utilisés dotent la pièce d'une atmosphère particulière. La couleur tendance lilas rappelle le printemps. La nature est en fleurs et les couleurs vives effacent le gris de l'hiver. Ce concept est une simple suggestion, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des conseils personnalisés.

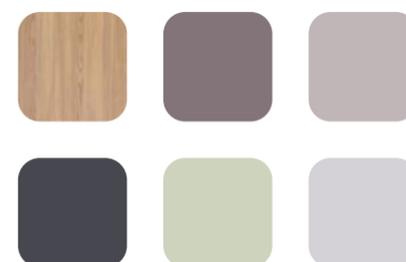

Économie d'énergie et fiabilité

Grâce à une motorisation novatrice

Grâce à leur nouveau moteur, les lits de soins sentida 5 et 6 sont encore plus faciles à utiliser, solides et efficaces sur le plan énergétique. La technologie LED intégrée, l'équipement économe en énergie et la conception facile d'entretien constituent des caractéristiques décisives pour le fonctionnement économique d'une maison de soins.



Plus facile à utiliser

Le nouveau sentida 5|6 comprend un branchement de lampe de lit LED intégré dans le moteur. De cette manière, un seul câble suffit entre le lit et le réseau électrique. La lampe LED peut désormais également être contrôlée avec la télécommande. Les vidéos sur l'utilisation du lit consultables via le QR Code placé sur le lit constituent également une nouveauté.



Vidéo

Solide et sécurisé

Le nouveau moteur est particulièrement puissant. Il révèle tous ses atouts, notamment en cas de charge importante. Il offre une charge nominale de fonctionnement sécurisée jusqu'à 270 kg (sentida 5|6) et supporte un poids résident maximal de 235/255 kg (selon les accessoires).



Rentable et économe en énergie

Avec un prix de l'électricité en constante augmentation, l'efficacité énergétique devient un facteur toujours plus essentiel. Le nouveau moteur est particulièrement économe, avec une consommation en veille extrêmement faible de 0,5 W seulement. Une gestion optimale des câbles garantit une usure moindre. Le câble d'alimentation peut être remplacé individuellement, ce qui diminue les coûts de stockage. L'exemple de calcul suivant montre l'impact sur les coûts de la consommation en mode veille des lits médicalisés :



Produit	Consommation en mode veille	Coûts d'électricité sur 15 ans*
Le NOUVEAU sentida	0,5 W	1 950 €
Lit A	3,76 W	15 345 €
Lit B	2,5 W	10 200 €
Lit C	1,7 W	6 900 €

*Exemple : maison de 100 lits

Lampes

soluna & lymera

Les éléments de conception spéciaux des luminaires sont les formes ondulées ou transparentes. Abat-jour avec le caractère partiellement translucide. Equipé d'un bras pivotant, nos lampes permettent le positionnement exact du point de lumière à proximité de l'objet à éclairer.



Lampe de lecture LED confort lymera

Avantages des LED

- Longue durée de vie
- Faible consommation énergétique
- Aucune production de chaleur
- Sécurité fonctionnelle



Lampe de lecture design LED soluna avec abat-jour ondulé



Version démontable

sentida 6-d

Au premier abord, le sentida 6-d ne se distingue pas d'un autre lit sentida. Même les paramètres techniques des deux lits sont identiques. La différence ne se perçoit que si on les regarde de plus près : le sentida 6-d est démontable et naturellement remontable par une personne seule, en un temps record et quasiment sans outil. Aucune pièce ne pèse plus de 18 kg, satisfaisant à toutes les exigences légales en matière de protection du travail.

Le sentida 6-d trouve son application pour les soins à domicile ou encore dans les maisons de soins aux portes étroites sans concessions au niveau du design, de la qualité ou de la stabilité !



sentida 6-d, démonté
Aucun groupe d'assemblage ne pèse plus de 18 kg.

Nous allons plus loin

memoriana | Conception d'espaces destinés aux personnes désorientées

Prodiguer les soins qui conviennent à un patient atteint de démence est un réel défi pour le personnel soignant et les proches. En coopération avec des spécialistes de la démence en Grande-Bretagne et en Allemagne, wissner-bosserhoff a mis au point un concept d'espace pour les malades atteints de démence. Spécialement adapté aux besoins de ces personnes, ce nouveau concept permet d'alléger notablement la charge de travail. Dès la phase de développement, ce concept devait atteindre trois objectifs majeurs en matière de soins et de bien-être pour les résidents atteints de maladies d'Alzheimer et apparentées :



L'amélioration de l'orientation

Les résidents ont des points de repère spatiotemporels qu'ils peuvent utiliser pour s'orienter. L'intégration ciblée de couleurs, de formes et d'objets contribue à bien visualiser l'espace environnant, les peurs et frustrations sont ainsi amoindries.



Accroissement du degré d'autonomie

Plus le résident est capable de se mouvoir de façon autonome dans son environnement, moins il sollicitera le personnel soignant. Des éléments d'ameublement fonctionnels, tels que des mains courantes et des surfaces d'appui dégagées, favorisent la mobilité et l'autonomie des personnes atteintes de démence. D'autres espaces sont, quant à eux, uniquement accessibles au personnel soignant.



L'optimisation de la sécurité

La sécurité des résidents revêt un aspect central. Des lits de soin bas équipés d'une barrière latérale, des mains courantes posées sur le mobilier et aux murs, ainsi que des aides à l'orientation visuelle offrent aux malades atteints de démence un maximum de sécurité sans avoir à souffrir de restrictions.



Modèle | Panneau de tête/de pied

Panneau de tête



Modèle A
Panneau de tête/
de pied



Modèle D



Modèle Df



Modèle G



Modèle K



Modèle O



Modèle T



Modèle Ts

Panneau de pied



Modèle Ak
Panneau de tête/
de pied



Modèle D



Modèle Df



Modèle G



Modèle K



Modèle O



Modèle T



Modèle Ts

Panneau de pied bas



Modèle Ak
replié



Modèle Dx



Modèle Dfx



Modèle Gx



Modèle Kx



Modèle Ox



Modèle Tx



Modèle Tsx

Couleurs et décors bois*



BLANC CRISTAL (U11026)



MAGNOLIA (U11509)



ÉRABLE PLANE (R27044)



CHÊNE DE LINDBERG (R20021)



TECK NORDIQUE (R50094)



CHÊNE ITALIEN (R20286)



ORME SALISBURY NATURE (R37016)



CERISIER HAVANNA (R42006)



HÊTRE VIEILLI (R24006)



HÊTRE ÉTUVÉ (R24034)



NOYER OKAPI (R30135)

Possibilités de combinaison pour le programme memoriana**



TECK NORDIQUE
CHÊNE ITALIEN



ÉRABLE PLANE
ORME SALISBURY NATURE




CERISIER HAVANNA
NOYER OKAPI

* Certains décors sont disponibles avec un supplément de prix. | ** Les meubles assortis se trouvent dans le catalogue „memoriana”.
Nous recommandons d'utiliser un échantillon original pour la sélection finale de la couleur

Housses pour panneaux de tête et de pieds Df*

Imitation cuir

La haute qualité des tissus choisis pour élaborer nos housses rendent ces dernières chaleureuses et plaisantes au toucher. En plus de proposer des designs originaux, les housses se distinguent également par leur facilité d'entretien. Le Simili cuir en PVC des housses ci-dessous permet d'allier durabilité et qualité. De plus amples informations sont disponibles sur demande.

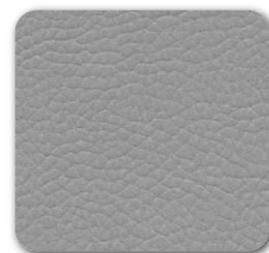

Gris argenté (F6461730)



Perle (F6461662)



Bouleau (F6461661)



Galet (F6461653)



Cachemire (F6461737)



Fumée (F6461660)



Merisier (F6461665)



Jaune maïs (F6461706)



Vert citron (F6461657)



Bleu roi (F6461710)

Propriétés de tous les matériaux présentés ici :

- Résistantes à l'humidité et aux salissures
- Respirantes
- Hydrofuges
- Résistantes au sang et à l'urine
- Résistantes aux désinfectants
- Extrêmement robustes
- Respectueuses de l'environnement et non toxiques
- Durables
- Difficilement inflammables

(en fonction des critères d'inflammation conformément à la norme DIN EN 1021 partie 1 et 2, notamment BS 5852 crib 5*)

Housses pour panneaux de tête et de pieds Df*

Tissu

Ces tissus d'ameublement sont incomparables par leurs aspects propres et soignés. Leur système innovant breveté ne laisse aucune chance aux bactéries, à la saleté ou à l'humidité. De beaux designs sur des tissus de première classe offrent de nombreuses possibilités de combinaison entre les tissus d'ameublement et de décoration. Nous utilisons notamment des fils de marque en Polyester FR ou en Trevira CS. De plus amples informations sont disponible sur demande.



Vert, à fleurs (Aurora 6520)



Bleu, rayé (Agon 5520)



Gris, rayé (Agon 8520)



Gris, chiné (Flint 8520)



Prairie (Mailo 6520)



Océan (Mailo 5520)



Sable (Mailo 1521)



Pierre (Mailo 8520)



Rose (Mailo 4520)

Nouvelles combinaisons possibles
Demandez-nous conseil !



Pour sûr

wissner-bosserhoff soumet volontairement et régulièrement ses procédés de fabrication et son management au contrôle de l'organisme allemand de contrôle et de certification TÜV Süd. L'entreprise est ainsi certifiée conforme à la norme DIN EN ISO 9001 pour les systèmes de gestion qualité, la norme DIN EN ISO 13485 pour la fabrication de dispositifs médicaux et à ISO 14001 pour la gestion de l'environnement.



ISO 9001:2015 ISO 13485:2016 ISO 14001:2015 Certificat CB pour la sécurité des produits, TÜV Süd Expertise des barrières latérales de sécurité




Tables de chevet et autres accessoires

que vous pouvez trouver dans des brochures supplémentaires ou sur www.wi-bo.com




Accessoires | SafeSense® et SafeLift

Tapis à capteur SafeSense® 2.1

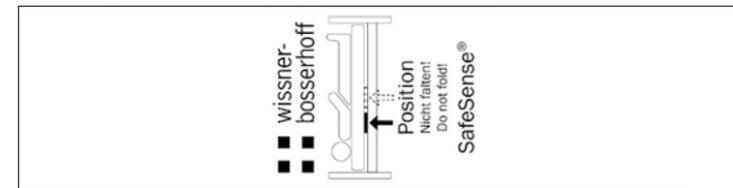

02-000876
Tapis à capteur SafeSense® 2.1
80 × 20 cm

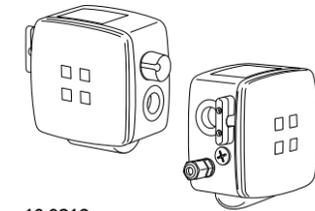


10-0812
Boîtier Bed-Exit 2.1 numérique avec câble ou sans fil

Également disponible en kit :

Tapis à capteur 2.1 et boîtier Bed-Exit 2
10-0871
Version câble
10-0872
Version radio

Kit de raccordement SafeSense®

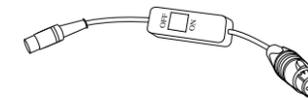

04-1508
Câble d'adaptateur avec interrupteur marche/arrêt et fiche adaptée pour le raccordement à l'installation d'appel (spécifique au client), pour versions câble et radio




04-1608
Câble d'adaptateur sans interrupteur marche/arrêt, avec fiche adaptée pour le raccordement à l'installation d'appel (spécifique au client), pour versions câble et radio

Aassistant de mobilisation SafeLift



10-0811
SafeLift Controller

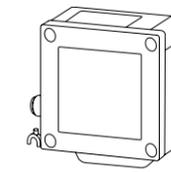


10-0808
Boîtier SafeLift

En kit :

10-0799
Kit SafeLift

Platine de fixation SafeSense® et SafeLift

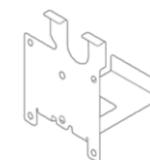


01-011193
Pour moteur DU09




01-011194
Pour moteur Q7

Équipements et accessoires

Dimensions

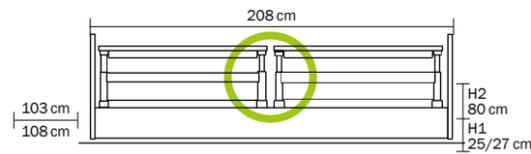


sentida avec demi-barrières latérales (10), sans espaces
Dimensions extérieures : L = 208 cm, l = 103/108 cm
Dimensions du matelas : L = 200 cm, l = 87 cm
H1 25/27 cm (lit en position basse), H2 80 cm (lit en position haute)

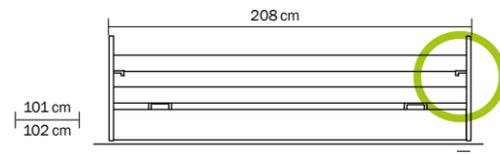


sentida avec barrières pleine longueur 09,
avec déclenchement par une poignée pistolet


Sommiers

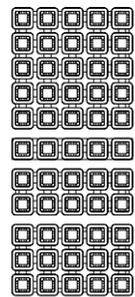

Comfort

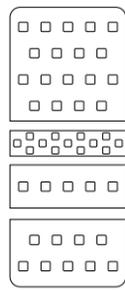


EasyClean

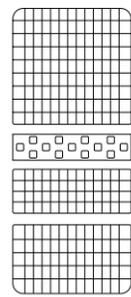


Standard | Aero


Rallonge de lit

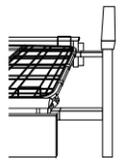


Rallonge de sommier temporaire demi-barrières 10 (Standard)

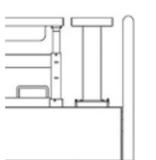


Rallonge de lit intégrée demi-barrières 10 (Option)

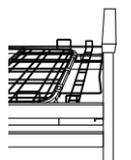

Rallonge de lit intégrée Barrières pleine longueur 09 (Option)

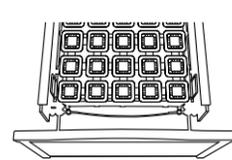

Rallonge de sommier avec déclenchement express (Option)

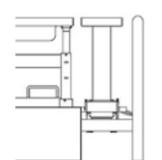

10-0570 / 10-0580
Protection pour rallonge de sommier de 20 cm (Option)

Options




Protection verticale



Protections horizontales et verticales à effet 3D




Déclenchement CPR sur le relève-buste

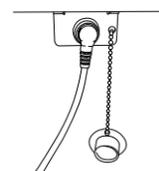


Plug & Play

01-010812, 01-010813
Éclairage sous le châssis commutable (non illustré)

Accessoires

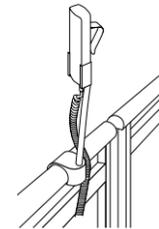

10-0419
Support accessoires pour demi-barrières 10
10-0421
Support télécommande
10-0790
Support de télécommande, court, SafeControl®

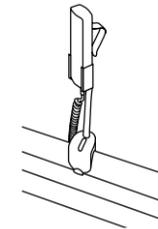

10-0422
Support accessoires pour barrières pleine longueur
10-0421
Support télécommande
10-0790
Support de télécommande, court, SafeControl®




50-0345
Abrégé Panier de bouteille d'urine
50-0164 Porte-poche à urine (sans ill.)




10-0817
Comblement de l'espace de base




10-0818
Comblement de l'espace design

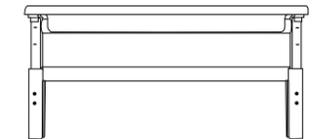


10-0819
Éléments latéraux Flex

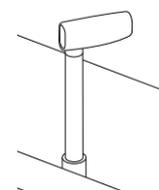


10-0634
Assistant de mobilisation manuelle MobiStick 2

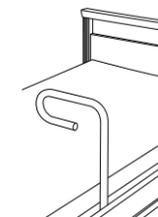

10-0715
Poignée de mobilisation pour une aide à l'autonomie du patient

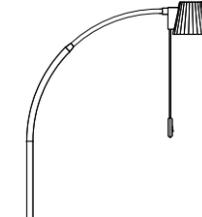


50-0550
Lampe LED design soluna avec bloc secteur

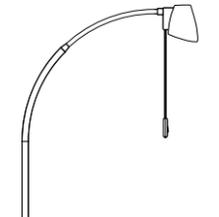

50-0677
Lampe de lecture LED confort lymera (avec et sans alimentation électrique) Abat-jour transparent




50-0771 | MA-212 (LINET France)
Tapis amortisseur de chute antidérapant Larg. 90 × long. 200 cm, épaisseur 4,5 cm environ

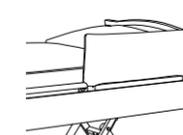


50-0174
Housse pour demi-barrières 10




50-0338
Housse pour barrières pleine longueur 09

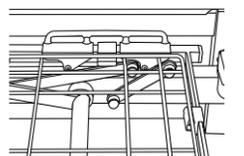


10-0563/10-0533/10-0521
Support Segufix
- pour le relève-cuisses
- pour le relève-buste
- pour l'assise

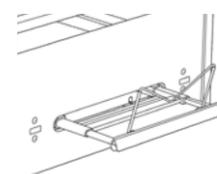


10-0617
Porte couverture intégrée Compatible avec tous les lits (à l'exception des barrières latérales triples 09 et du design A-kk)

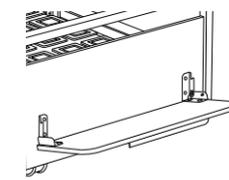

10-0719
Porte-couverture

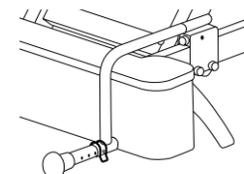

Protections verticales côté tête, télescopiques, uniquement pour sentida 5 et 6
10-0801 courtes, 1 x 20 mm
10-0802 moyennes, 4 x 20 mm
10-0803 longues, 8 x 20 mm
Protections verticales côté tête, uniquement pour sentida 5 et 6 (non illustrées)

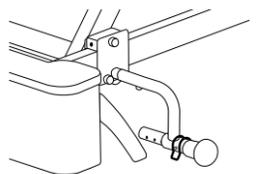

Protections verticales latérales, télescopiques, uniquement pour sentida 5 et 6
10-0804 courtes, 1 x 20 mm
10-0805 moyennes, 4 x 20 mm
10-0806 longues, 8 x 20 mm
Protections verticales latérales, uniquement pour sentida 5 et 6 (non illustrées)



wissner-bosserhoff Belgium B.V. | ESRI B.V.
Evenementenlaan, 8 | 3001 Heverlee | Belgium
Tel. +32 15 210841 | Fax +32 15 291464 | info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

LINET

LINET France SAS
7, rue Augustin Fresnel, Z.I. N° 1 | 37170 Chambray les Tours | France
Tél. : +33 247 250 210 | Fax : +33 247 482 106 | info@wi-bo.fr | www.wi-bo.fr



Bigla Care AG
Bahnhofstrasse 4 | CH-3507 Biglen | Switzerland
Tel.: +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch



Members of LINET Group

